

Sanifix absorberande kalsong

Art nr: 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546

Avsedd användning: Sanifix absorberande kalsong är en absorberande flergångsbyxa med hög kapacitet vid en funktionsnedsättning som droppinkontinens hos användaren.

Sanifix absorberande kalsong är en tvättbar, absorberande flergångsbyxa för vuxna. Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg samt ett spärrskikt som förhindrar genomvättning och ger hög komfort och säkerhet. Byxan är tillverkad i mjuk bomull och är ett bra alternativ till engångsskydd vid droppinkontinens. Modellen passar särskilt bra för vuxna som har svårt att behålla engångsskydd på plats eller som är känsliga för klister, och bidrar till ökad rörelsefrihet och trygghet i vardagen. Byxan tål cirka 100 tvättar i 60 °C utan att förlora passform eller uppsugningsförmåga och den kan torktumlas på låg värme.



Produktvarianter

Storlek	Art.nr	Höft	Midja	Benöppning	Vikt/produkt
XS	6540	71-79 cm	54-70 cm	42-52 cm	67 g
S	6541	81-88 cm	56-74 cm	46-58 cm	69 g
M	6542	91-97 cm	64-84 cm	54-64 cm	79 g
L	6543	102-107 cm	76-90 cm	58-70 cm	95 g
XL	6544	112-117 cm	80-106 cm	62-80 cm	104 g
XXL	6545	122-132 cm	88-120 cm	70-88 cm	113 g
XXXL	6546	137-147 cm	100-146 cm	80-100 cm	104 g

Teknisk data

- Material: 95% bomull och 5% spandex (byxan), 70% viskos och 30% polyester (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt)
- Antal/förpackning: 1 st
- Färg: vit
- Krympning: <5%
- Förväntad livslängd: ca 100 tvättar i max 60°C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Textilåtervinning eller brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
- Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml: 66,6 ml

Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

Före användning

- Det är viktigt att prova ut rätt storlek för säkerställa optimal funktion och komfort. Storleken mäts runt midjan.
- Produkten ska tvättas före första användning för att aktivera absorptionsförmågan.

REF Produktens artikelnummer



Maskintvätt i max 60 °C



Ej kemtvätt



Produkten är en medicin-teknisk produkt



Tyget tål ej blekning



Torktumling på låg värme



Produkten innehåller inte PVC



Får ej strykas



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Produkten innehåller inte latex



Tål ej sköljmedel



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-21 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=sanifix>