

Sanifix absorberande boxersshorts

Art nr: 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576

Avsedd användning: Sanifix absorberande boxersshorts är en absorberande flergångsbyxa med hög kapacitet vid en funktionsnedsättning som droppinkontinens hos användaren.

Sanifix absorberande boxersshorts är en tvättbar, absorberande flergångsbyxa för vuxna. Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg samt ett spärrskikt som förhindrar genomvättning och ger hög komfort och säkerhet. Byxan är tillverkad i mjuk bomull och är ett bra alternativ till engångsskydd vid droppinkontinens. Modellen passar särskilt bra för vuxna som har svårt att behålla engångsskydd på plats eller som är känsliga för klister, och bidrar till ökad rörelsefrihet och trygghet i vardagen. Byxan tål cirka 100 tvättar i 60 °C utan att förlora passform eller uppsugningsförmåga och den kan torktumlas på låg värme.



Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höft	Midja	Benöppning	Vikt/produkt
XS	6570	70-84 cm	71-78 cm	32-44 cm	88 g
S	6571	80-100 cm	81-88 cm	40-52 cm	132 g
M	6572	86-110 cm	91-97 cm	44-56 cm	145 g
L	6573	93-120 cm	102-107 cm	50-60 cm	158 g
XL	6574	104-130 cm	112-117 cm	54-64 cm	169 g
XXL	6575	110-140 cm	122-132 cm	58-69 cm	189 g
XXXL	6576	120-150 cm	137-142 cm	60-70 cm	224 g

Teknisk data

- Material: 95% bomull och 5% spandex (byxan), 70% viskos och 30% polyester (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt)
- Antal/förpackning: 1 st
- Färg: Svart
- Krympning: <5%
- Förväntad livslängd: ca 100 tvättar i max 60°C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Textilåtervinning eller brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
- Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml: 116,6 ml

Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvariga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

Före användning

- Det är viktigt att prova ut rätt storlek för säkerställa optimal funktion och komfort. Storleken mäts runt midjan.
- Produkten ska tvättas före första användning för att aktivera absorptionsförmågan.

REF	Produktens artikelnummer		Maskintvätt i max 60 °C		Ej kemtvätt
MD	Produkten är en medicin-teknisk produkt		Tyget tål ej blekning		Torktumling på låg värme
	Produkten innehåller inte PVC		Får ej strykas		Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745
	Produkten innehåller inte latex		Tål ej kalltvätt		Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-22 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=sanifix>