


Uppresningsstöd Adam

Art nr: 151086, 151088

Avsedd användning: ADAM är ett uppresningsstöd som kan användas som vändhantag samt som stöd vid i- och urstigning ur säng och soffa. ADAM kan användas av privata brukare samt brukare i vården.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höjd	Vikt	Maximal brukarvikt
Adam Låg	151086	80 cm	11,4 kg	150 kg
Adam Hög	151088	90 cm	11,9 kg	130 kg

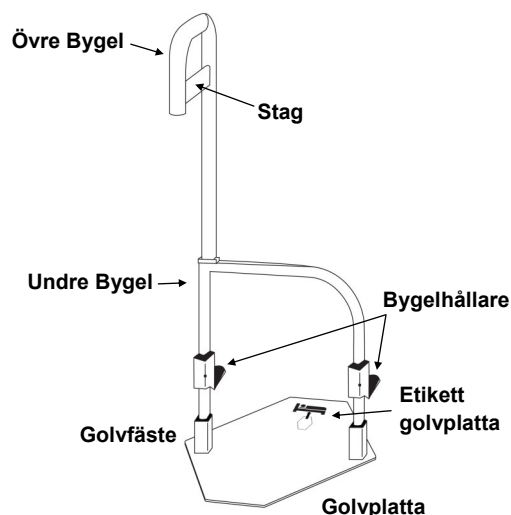

Teknisk data

Material: Pulverlackerade stålrör, plaststyrningar i POM och rondeller/antiglid i EPDM-gummi
Förväntad livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll utfört av behörig personal.
Förvaring: Rumstemperatur
Återvinning och avfall: Ytteremballage sorteras som wellpapp och uppresningsstödet, bygel och golvplatta sorteras som metallskrot.

Reservdelar

Insexskruv M8x16 mm, svart (Art.nr 15106022)
Insexnyckel NV4 mm (Art.nr 15106023)
Rondell D90 gummi (Art.nr 15100013)
Antiglid 74x20x2 mm (Art.nr 15106025)
Plaststyrning (Art.nr 11171004)
Magnet för insexnyckel (Art.nr 15106026)
Etikett golvplatta (Art. nr 15106030)
Klämskydd ADAM (Art. Nr 151072)

Beståndsdelar

Golvplatta (Art.nr 151060, bredd 35 cm): 8,4 kg
Bygel Låg (Art.nr 151082): 3,1 kg
Bygel Hög (Art.nr 151084): 3,4 kg
Bygelhållare (fäste) (Art.nr 15106020)
Klämskydd ADAM (Art. Nr 151072)

Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan ni använder produkten.

⚠ Felaktig användning

Observera att ADAM endast är avsedd att användas som uppresningsstöd vid säng/soffa. Den skall inte användas som skydd för att förhindra att en person rullar ur sängen/soffan.

⚠ Riskbedömning av brukare

Innan uppresningsstödet monteras skall brukarens fysiska och kognitiva förmåga riskbedömas av förskrivaren. Nedsatt kognition, balans eller muskeltonus kan påverka användningen och medföra säkerhetsrisker. Förskrivaren skall göra regelbundna riskbedömningar för att säkerställa att uppresningsstödet är fortsatt lämpligt för brukaren över tid.

⚠ Säker sittposition vid uppresning

Förskrivaren skall säkerställa att brukaren kan sitta stadigt på säng-/soffkanten med god kontakt med båda fötterna i golvet vid uppresning. Detta är en förutsättning för säker användning.

⚠ Korrekt montering av golvplatta

Kontrollera att golvplattan är monterad med skruvarna på golvfästena pekandes in mot sängen/soffan, se "Monteringsanvisning".

⚠ Säng-/soffkompatibilitet

Observera att vissa säng-/soffkonstruktioner, exempelvis madrasser/soffdynor som har en otillräcklig kantstabilitet (sängens/soffans ytterkant ger efter när man sitter eller ligger nära kanten) kan göra det omöjligt att använda uppresningsstöd ADAM på ett säkert sätt.

⚠ Kontrollera eventuell glipa

Om det uppstår en glipa mellan säng/soffa och uppresningsstödet ökar risken för klämskador ju större glipan är. Riktvärde: glipan skall vara mindre än 4 cm, se bild E och F.

⚠ Användning på ställbara sängar/soffor

Uppresningsstöd ADAM skall inte installeras på justerbara/ställbara sängar/soffor eller i kombination med elryggstöd. Undantag är om den justerbara/ställbara sängen/soffan är låst i horisontalläge och utan någon möjlighet att ändra position. Säkerställ att sängen/soffan inte kan justeras oavsiktligt. Riskbedömning skall göras av behörig personal vid installation.

⚠ Ej avsedd för sängar med medar

Stödet skall inte användas med sängar som har medar eftersom dessa kan glida eller tippa vid belastning. Byt ut medarna mot fyra stabila sängben före montering.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-43 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.

⚠ Kombination med andra hjälpmedel

Säkerställ att en riskbedömning görs när uppresningsstöd ADAM används i kombination med andra hjälpmedel som t.ex. förhöjningsklossar och glidlakan.

⚠ Användning med förhöjningsklossar

Om sängen/soffan är utrustad med förhöjningsklossar, skall dessa omsluta och sitta fast runt sängens/soffans ben.

⚠ Användning tillsammans med dävert

Vid användning av dävert, säkerställ att ADAMs golvplatta inte hamnar på dävertens golvplatta för att säkerställa stabiliteten på uppresningsstödet.

⚠ Ej avsedd för små barn

Stödet är inte avsett för små barn och får inte användas som leksak eller klätterstege.

⚠ Vid osäkerhet kring montering

Följ alltid bruksanvisningen noggrant. Vid osäkerhet, kontakta återförsäljare eller Swerecos kundsupport.

⚠ Vid tillbud eller fel

Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel skall detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvariga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Monteringsförberedelser

Swereco kan inte garantera säkerhet eller funktion om produkten används, modifieras eller monteras på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning. Följ därför instruktionerna noggrant.

Kontrollera sängens/soffans konstruktion före montering

Vissa sängar/soffor är inte lämpliga att använda tillsammans med uppresningsstöd ADAM.

- Madrasser/dynor med otillräcklig kantstabilitet där ytterkanten sjunker ihop när man sitter eller ligger nära kanten.
- Kontrollera att säng-/sofframen är stabil. Bredden på ramen ska vara 2–8 cm. Detta för att säkerställa att stödets bygelhållare kan monteras korrekt så att stödet sitter stabilt mot sängen/soffan.
- När ADAM ska monteras på en enkelsäng skall sängen alltid placeras med en långsida mot en vägg.


Monteringsanvisning

För förskrivna produkter: Installation skall utföras av behörig personal. Vid osäkerhet – kontakta återförsäljare eller Swerecos kundsupport.

- Avståndet mellan sängens huvudände/soffans armstöd (insida) och bygel (se markerat avstånd L i bild A) skall vara **mindre än 4 cm** eller **mer än 32 cm** för att minimera klämrisk.
- Avstånd mellan golv och undersida säng/soffa (se markerat avstånd H i bild A) får max vara:
ADAM Låg: 12 cm
ADAM Hög: 22 cm
- Undvik lösa föremål såsom mattor eller möbler i närheten av uppresningsstödet som kan utgöra en snubbelrisk.

1. Trä på de två bygelhållarna på den undre bygel. Plattjärnen på bygelhållarna som senare skall monteras under sängen/soffan skall vara riktade uppåt och vara försedda med antiglidband, se bild B.
2. Tryck ned den undre bygel i golvplattans fästen. **Observera skruvarna på golvplattans fästen ska peka in under sängen/soffan, se bild B.**
3. Säkerställ att den undre bygel är ordentligt nedtryckt i golvplattans fästen och dra åt skruvarna ordentligt med den medföljande insexnyckeln. Den undre bygel får då en lätt lutning in mot sängen/soffan.
4. Trä på klämskydd ADAM på den övre bygel. Se till att klämskyddets hål ligger i linje med de stansade hålen i bygel för att underlätta montering.
5. Montera den övre bygel med klämskydd och säkra den med låstappen. **Kontrollera att den övre bygel är riktad utåt från sängen, se bild C.**

6. Skjut in golvplattan under sängen/soffan i enlighet med riktningen som anges på etiketten. Stödet skall alltid monteras vid sängen/soffan på ett sådant sätt att stödet alltid är placerat till vänster om brukaren vid användning, se bild D.1. **Observera att monteringen enligt bild D.2 är felaktig.**
7. Dra upp bygelhållarna mot säng-/sofframen och säkerställ att plattjärnen på bygelhållarna sitter mellan träribborna i säng-/soffbotten.

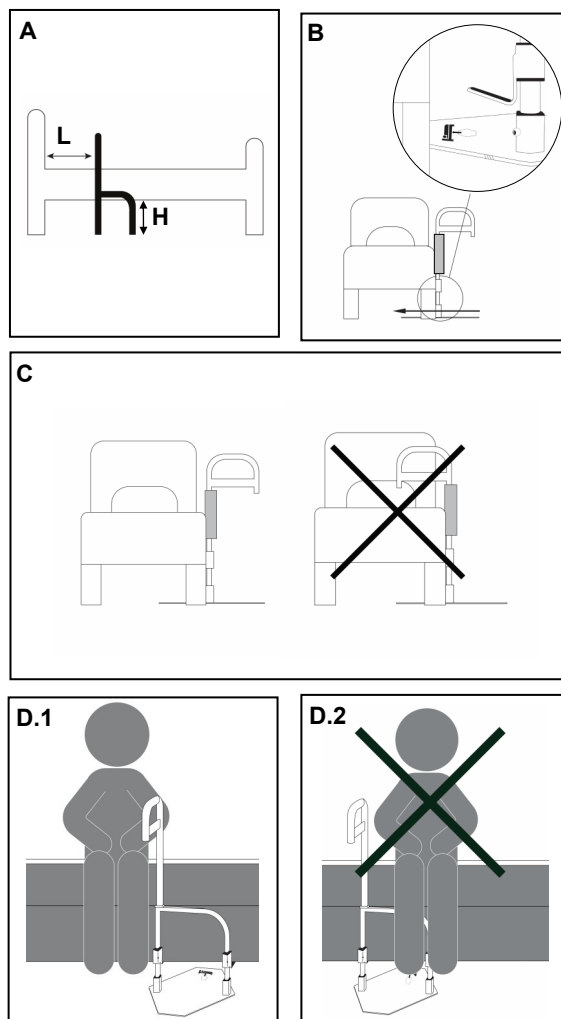



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-43 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.

8. Dra åt skruvarna på bygelhållarna ordentligt med den medföljande insexnyckeln. Felaktigt/otillräckligt åtdragna skruvar kan orsaka instabilitet.
9. Om plattjärnet på en bygelhållare hamnar ovanpå och inte emellan träribborna på säng-/soffbotten skall uppresningsstödet stabilitet säkerställas innan användning. Om stödet inte sitter stabilt skall det inte användas i kombination med den aktuella sängen/soffan.
10. Fäst insexnyckeln på magneten som sitter på insidan av golvplattans fäste för lätt åtkomst.
11. Säkerställ att stödet sitter stabilt mot sängen/soffan samt att avståndet mellan madrass/soffdyna och bygel inte skapar en glipa både vid och utan belastning. Riktvärde: glipan ska vara mindre än 4 cm, se bild E och F.

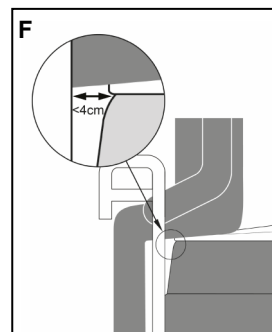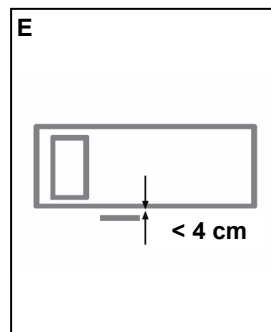

⚠ Kontrollera avståndet/glipan mellan säng/soffa och uppresningsstöd genom att belasta sängen/soffan. Belasta sängen/soffan genom att sätta dig med båda fötterna i golvet vid uppresningsstödet och kontrollera att stödet sitter tätt mot sängen/soffan.

Säkerhetskontroll

- Kontrollera alltid att installationen är korrekt, både vid montering och regelbundet under användning.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör stödet med mild tvållösning (pH 5–9) eller 70 % isopropanol. Använd inte etanol då det kan skada plastdetaljer.
- Produkten kan desinficeras i avsedd desinfektionsutrustning vid 85 °C i minst 3 minuter.
- Produkten skall rekonditioneras mellan varje brukare vilket inkluderar fullständig kontroll och byte av slitna/skadade delar.

Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Alla skruvar är åtdragna.
- Inga skador finns på produkten.
- Att antiglidbanden på bygelhållarens plattjärn samt rondellerna under golvplattan sitter på plats och inte är slitna. Byt dessa vid behov.
- Byt etikett golvplatta vid behov och säkerställ att den placeras korrekt på golvplattan, se bild B.
- Uppresningsstödet är stabilt.
- Ingen glipa större än 4 cm finns mellan säng och uppresningsstödet, både vid och utan belastning.



Produktens partnummer



Produktens utgångsdatum



Produktens artikelnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Varning



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-43 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.