

Ryggstöd för toaförhöjning StaplaLätt, toaförhöjning och duschstol Robust

Art nr: 144206 (StaplaLätt), 142143 (Robust)

Avsedd användning: Ryggstödet är ett tillbehör till Toaförhöjning StaplaLätt (144202, 144204). Toaförhöjning Robust (144400) och Duschstol Robust (142140)

Säkerhetsanvisningar

Korrekt montering: Ryggstödet måste monteras enligt anvisningarna och säkerställas att det sitter fast ordentligt innan användning. Felaktig montering kan leda till instabilitet och ökad fallrisk.

Ej avsett som belastningsstöd: Ryggstödet är endast avsett som ett stöd vid sittande och får inte användas för att trycka sig upp eller luta sig kraftigt bakåt, då detta kan orsaka att stolen tipsar.

Kontrollera infästning: Ryggstödet ska inspekteras regelbundet för att säkerställa att det inte lossnat eller har synliga skador. Vid tecken på sprickor eller glapp måste ryggstödet bytas ut.

Maxbelastning: Produkten är konstruerad för en maximal brukarvikt på 160 kg (300 kg för Robust). Överskrid inte denna viktgräns, då det kan påverka stabiliteten och hållbarheten.

Ej avsett för lutning bakåt: Brukaren bör sitta i upprätt position och inte luta sig kraftigt bakåt, då detta kan påverka stolens stabilitet.

Undvik ojämna underlag: Produkten ska placeras på ett stabilt, plant underlag för att minimera risken för att stolen välter vid användning av ryggstödet.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör produkten regelbundet med en mild tvållösning (pH 5–9) eller 70% isopropanol. Använd ej etanol då det kan skada plastdetaljer.
- Produkter ska rekonditioneras mellan varje brukare, vilket inkluderar en fullständig kontroll och byte av eventuellt utslitna eller skadade komponenter. Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Återvinning

- När produktens livslängd är uppnådd eller om den är skadad ska den kasseras som metallsrot.



Monteringsanvisningar (toaförhöjning och duschstol)

1. Torka rent stativet innan montering.
2. Montera antiglidbanden på stativet där ryggstödet ska fästas. För Robust ryggstöd är antiglidbandet redan monterat.
3. Placera ryggstödet på stativet över antiglidbanden och fäst ryggstödet med skruv och mutter på båda sidorna av stativet. Dra åt ordentligt.

Robust



StaplaLätt

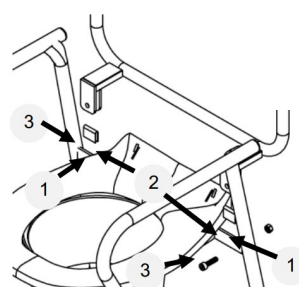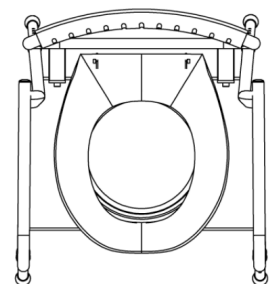

Konsultera bruksanvisning



Produktens partnummer



Produktens artikelnummer



Produktens utgångsdatum



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-45 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/ryggstod-till-staplalett-144206>