

Isdubb Spets, Isdubb Krona

Art. nr: 123300, 123300K, 123350, 123350K

Avsedd användning: Isdubben är ett tillbehör som fästes på Swereco-kryckan för att ge bättre grepp vid halt underlag. Isdubben passar till kryckor med diameter 17-23 mm.

Produktvarianter

Model	Art. nr	Förpackning
Isdubb Spets	123300	—
Isdubb Spets	123300K	Konsumentförpackad
Isdubb Krona	123350	—
Isdubb Krona	123350K	Konsumentförpackad



Teknisk data


- Material: isdubb av stål, plastknoppar av polypropen
- Förväntad livslängd: 5 år vid normal användning. Produktens livslängd kan förlängas om den regelbundet kontrolleras och inte uppvisar tecken på slitage eller skador.
- Återvinning och avfall: när produktens livslängd är uppnådd eller om den är skadad ska den kasseras som metallsrot

Övrig information

- Vid frågor om produkten kontakta förskrivare, återförsäljare eller Swereco.
- Rengör vid behov. Undvik starka rengöringsmedel.
- Kontrollera att isdubben inte är sliten innan användning.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

Monteringsanvisning:

1. Isdubben monteras på kryckan med de medföljande skruvarna (förmonterade på fästet), säkerställ att båda skruvarna skruvas åt lika hårt för att isdubben inte ska hamna snett i förhållande till kryckröret.
2. För att fälla isdubben upp eller ned, tryck ihop de vita plastknopparna.
3. Innan användning, säkerställ att isdubben är ordentligt fixerad i nedfällt läge.

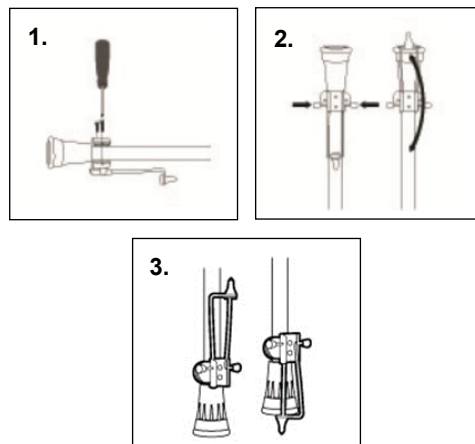

Produktens artikelnummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Tillverkare



Konsultera bruksanvisning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-49 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/tillbehor>