

# Lakansskydd Eldner

## Art nr: 1169-S-M-L

**Avsedd användning:** Lakansskydd Eldner är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage.

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.



## Produktvarianter

Art.nr	Totalyta (cm)	Absorberande yta (cm)	Sängbredd (cm)
1169-S	B190xL85	B90xL85	80-105
1169-M	B215xL85	B115xL85	110-120
1169-L	B250xL85	B150xL85	140x160

## Teknisk data

- Material: 50% bomull och 50% polyester (ligg yta), 95% polyester och 5% rayon (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt), 50% bomull och 50% polyester (bäddflikar), polyester (undersida)
- Antal/förpackning: 1 st
- Förväntad livslängd: ca 450 tvättar i max 90 °C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Textilåtervinning eller brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
- Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015: 1537 ml (+/- 43 ml)

## Före användning

- Produkten ska tvättas före första användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med Sanicare-trycket mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna under madrassen. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.

## Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Bädda alltid in bäddflikarna.
- Observera att lakansskyddet inte är till för att lyfta brukare med.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

REF	Produktens artikelnummer	90°C	Maskintvätt i max 90 °C	✗	Ej kemtvätt
MD	Produkten är en medicinteknisk produkt	✗	Tyget tål ej blekning	☉	Torktumling på låg värme
PVC	Produkten innehåller inte PVC	✗	Får ej strykas	CE	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745
LATEX	Produkten innehåller inte latex	✗	Tål ej sköljmedel	🏭	Tillverkare

# SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,  
SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com  
+46 (0)8 5000 5240

## IFU 2026-06 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.  
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=lakansskydd>