

Lakansskydd Brage

Art nr: 12221-S-M-L

Avsedd användning: Lakansskydd Brage är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage.

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.



Produktvarianter

Art.nr	Totalyta (cm)	Absorberande yta (cm)	Sängbredd (cm)
12221-S	B190xL85	B90xL85	80-105
12221-M	B215xL85	B115xL85	110-120
12221-L	B250xL85	B150xL85	140x160

Teknisk data

- Material: polyester (ligg yta), 95% polyester och 5% rayon (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt), 50% bomull och 50% polyester (bäddflikar), polyester (undersida)
- Antal/förpackning: 1 st
- Förväntad livslängd: ca 450 tvättar i max 90 °C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Textilåtervinning eller brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
- Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015: 1668 ml (+/- 49 ml)

Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Bädda alltid in bäddflikarna.
- Observera att lakansskyddet inte är till för att lyfta brukare med.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

Före användning

- Produkten ska tvättas före första användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med Sanicare-trycket mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna under madrassen. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.

REF	Produktens artikelnummer	Maskintvätt i max 90 °C	Ej kemtvätt
MD	Produkten är en medicin-teknisk produkt	Tyget tål ej blekning	Torktumling på låg värme
	Produkten innehåller inte PVC	Får ej strykas	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745
	Produkten innehåller inte latex	Tål ej kalltvätt	Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-07 ver 01
Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=lakansskydd>