

# Inkoglid Hera

## Art nr: 10391

**Avsedd användning:** Absorba inkoglid är ett sänghjälpmiddel för personer med inkontinens. Produkten har en glidyta undertill som underlättar för vårdpersonal vid positionering och vändning av brukaren i sängen.



**Produktbeskrivning:** Inkoglid Hera är ett lakansskydd med handtag som har en undersida av lågfriktionsmaterial. Inkoglidet används till stor del av vårdpersonal som assisterar/omvårdar brukare som har inkontinens och som även behöver positioneras eller förflyttas i sängen. Med hjälp av glidytan på baksidan samt handtagen kan inkoglidet även användas som ett draglakan. Inkoglidet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Inkoglidet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten.

### Produktvarianter

Art.nr	Totalyta (cm)	Absorberande yta (cm)	Sängbredd (cm)
10391	B110x90	B110x90	90-110

### Teknisk data

- Material: borstad polyester (ligg yta), 65% polyester och 35% rayon (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt), polyester (undersida)
- Antal/förpackning: 1 st
- Förväntad livslängd: ca 200 tvättar i max 90 °C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: textilier sorteras enligt lokala anvisningar
- Absorptionskapacitet: 2476 ml

### Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Viktig att rätt storlek på glidlakanet används till rätt sängbredd.
- Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

### Före användning

- Tvätta inkoglidet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera inkoglidet i sängen med glidytan mot madrassen.
- Då inkoglidet används som draglakan, ta ett stadigt grepp om handtagen vid förflyttning/positionering.
- Var noga med att Inkoglidet är anpassat efter sängens bredd.

REF	Produktens artikelnummer	90°C	Maskintvätt i max 90 °C	✗	Ej kemtvätt
MD	Produkten är en medicin-teknisk produkt	✗	Tyget tål ej blekning	☉	Torktumling på låg värme
✗	Produkten innehåller inte PVC	☹	Tål strykning med en låg temperatur	CE	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745
✗	Produkten innehåller inte latex	✗	Tål ej sköljmedel	🏭	Tillverkare

# SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,  
SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com  
+46 (0)8 5000 5240

### IFU 2026-08 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.  
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=inkoglid>