

Inkoglid Zeus

Art nr: 12421**Avsedd användning:** Absorba inkoglid är ett sänghjälpmiddel för personer med inkontinens.

Produkten har en glidyta undertill som underlättar för vårdpersonal vid positionering och vändning av brukaren i sängen

**Produktbeskrivning:** Inkoglid Zeus är ett lakansskydd med handtag som har en undersida av lågfriktionsmaterial samt bäddflikar för att fixera vid bäddningen. Inkoglidet används till stor del av vårdpersonal som assisterar/omvårdar brukare som har inkontinens och som även behöver positioneras eller förflyttas i sängen. Med hjälp av glidytan på baksidan samt handtagen kan Inkoglidet även användas som ett draglakan.

Inkoglidet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material.

Inkoglidet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten.

Produktvarianter

Art.nr	Totalyta (cm)	Absorberande yta (cm)	Sängbredd (cm)
12421	B230x90	B110x90	90-110

Teknisk data

- Material: borstad polyester (ligg yta), 80% bomull och 20% polyester (bäddflikar), 65% polyester och 35% rayon (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt), polyester (undersida), kraftig nylon (handtag)
- Antal/förpackning: 1 st
- Förväntad livslängd: ca 200 tvättar i max 90 °C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: textilier sorteras enligt lokala anvisningar
- Absorptionskapacitet: 2476 ml

Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Viktig att rätt storlek på glidlakanet används till rätt sängbredd.
- Bädda alltid in bäddflikarna.
- Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Före användning

- Tvätta Inkoglidet före användning för att aktivera absorptionsförmågan
- Placera Inkoglidet i sängen med glidytan mot madrassen.
- Fixera skyddet med hjälp av bäddflikarna runt madrassen.
- Då Inkoglidet används som draglakan, ta ett stadigt grepp om handtagen vid förflyttning/positionering.
- Var noga med att Inkoglidet är anpassat efter sängens bredd.

REF Produktens artikelnummer

Maskintvätt i max 90 °C



Ej kemtvätt



Produkten är en medicin-teknisk produkt



Tyget tål ej blekning



Torktumling på låg värme



Produkten innehåller inte PVC



Tål strykning med en låg temperatur



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Produkten innehåller inte latex



Tål ej sköljmedel



Tillverkare

SWERECOSwereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240**IFU 2026-09 ver 01**Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=inkoglid>