

Sanisafe rökskydd

Art nr: 7214

Avsedd användning: Rökförklädet är avsett att användas av personer som röker sittande, i syfte att minska risken för att kläder eller sittmöbel antänds.

Produktbeskrivning: Sanisafe Rökskydd är tillverkat i glasfiber vilket gör att det inte går hål eller antänds om en cigarett blir liggande på materialet. Produkten används av rökare.

Produkten är flamspridningstestat enligt NT Fire 029 med riktlinjerna i SS8760001.



Teknisk data

- Material: glasfiber, silica gel
- Antal/förpackning: 1 st
- Mått: B90xL180 cm
- Vikt: 750 g
- Färg: silvergrå
- Förvaring: rumstemperatur
- Rengöring: torkas med mild tvällösning eller dropptorkas
- Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid efterfrågan.
- Återvinning och avfall: sorteras efter lokal anvisning

Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.
- Säkerställ att rökskyddet ligger rätt placerat på möbelen och täcker textil och andra hålrum.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

REF Produktens artikelnummer

MD Produkten är en medicinteknisk produkt

PVC Produkten innehåller inte PVC



Produkten innehåller inte latex



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-12 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/fall-sakerhet/rokskydd>