


Gåbock Kvadrant

Art nr: 121150, 121160, 121165

Avsedd användning: Gåbock Kvadrant är avsedd att användas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Ställbar höjd (cm)	Vikt (kg)	Max brukarvikt (kg)
Gåbock kvadrant, vuxen	121150	79-99	1,1	120
Gåbock kvadrant, junior	121160	63-74	1	120
Gåbock kvadrant, barn	121165	48,5-58,5	0,7	50

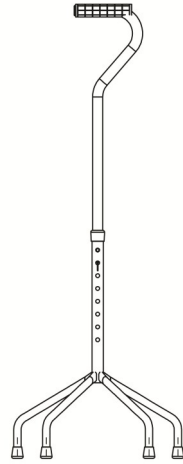

Reservdelar

- Doppsko kvadrant (Art. nr 120710)

Teknisk data

- Material: stålrör, aluminiumrör (överdel för barn och junior), PVC (handtag), naturgummi (doppsko)
- Förväntad livslängd: 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning.
- Förvaring: förvara produkten i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus eller extrem värme/kyla.
- Återvinning och avfall: Metall- och plaståtervinning. Sorteras efter lokal anvisning

Säkerhetsanvisningar

⚠ Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av gåbocken får göras.

⚠ Gåbockens förväntade livslängd är fem år. Efter fem år bör inte gåbocken användas, då det finns risk för utmattning om gåbocken använts kontinuerligt under längre tid. Gåbockens utgångsdatum är angivet på produktetiketten placerad på gåbocken.

⚠ Vid tecken på slitage eller skada på gåbocken får den inte användas. Kontrollera regelbundet att tappen på höjjusteringen inte glappar. Uppmärksammas detta får kryckan inte användas.

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Gåbocken bör endast brukas på plant underlag. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Produkten kan utgöra snubbelrisk. Var uppmärksam på produktens placering och använd den med försiktighet.
- Produkten ska ej användas på vått underlag pga halkrisk.
- Gåstativet får inte användas på mattor som kan glida eller utgöra en snubbelrisk.
- Produkten ska inte användas i trappor.
- Handtaget ska inte rotera vid normal användning. Viss rörlighet kan dock förekomma. Om handtaget roterar när stödet greppas, ska produkten inte användas.


- Produkten ska ej belastas med saker ex. klädesplagg, väskor eller liknande.
- Produkten ska ej användas som en leksak.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Inställningsanvisningar

- Gåbocken bör justeras av person med relevant kompetens för korrekt anpassning efter brukarens förutsättningar.
- Höjden justeras med tryckknappen, se figur 1.
- Säkerställ att benen är riktade bort från brukaren. Vid behov, vrid handtaget 180° med intryckt tryckknapp.

Användaranvisning

- Vid användning ska gåbockens ben vara riktade bort från brukaren. Detta justeras genom att vrida handtaget 180 grader.
- Placera gåbocken cirka 5–10 cm utanför och något framför foten för god stabilitet.
- Använd gåbocken enligt vårdgivarens instruktioner.
- Vid förflyttning över trösklar, var uppmärksam på att gångstödet ska lyftas över tröskeln och att alla fyra ben ska sättas ned på golvet samtidigt.

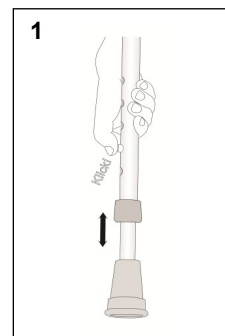

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-15 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=kvadrant>

Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Doppskor finns monterade på alla ben.
- Doppskorna inte är slitna eller skadade. En sliten eller skadad doppsko ska bytas ut.
- Tryckknappen för höjjustering fjädrar tillbaka som den ska. Om tryckknappen inte fjädrar tillbaka ska gåbocken tas ur bruk.
- Inga sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage har uppstått på produkten. Hittas sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage ska gåbocken tas ur bruk.
- Att alla fyra ben är i kontakt med marken vid belastning och rörelseförflyttning.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör kryckan med mild tvållösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Produkter som rekonditioneras ska inkludera en fullständig kontroll enligt instruktionen nedan.



Produktens partinummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produktens utgångsdatum



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare



Produktens artikelnummer



Maximal brukarvikt



Varning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-15 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=kvadrant>