

Stödkäpp

Avsedd användning: Stödkäppen är avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Benämning	Artikel-nummer	Längd (cm)	Max brukarvikt (kg)	Produktvikt (kg)
Stödkäpp REKO Profil, höger	124300	75-97	100	0,34
Stödkäpp, höger, vit	124309	75-97	100	0,34
Stödkäpp REKO Profil, vänster	124310	75-97	100	0,34
Stödkäpp, vänster, vit	124319	75-97	100	0,34
Stödkäpp Flex, rak	124400	75-97	100	0,34
Stödkäpp Flex, lång	124401	95-117	100	0,38
Stödkäpp Flex, vit	124409	75-97	100	0,34
Stödkäpp Flex Ergo, höger	124410	75-97	100	0,34
Stödkäpp Ergo, höger, vit	124419	75-97	100	0,34
Stödkäpp Flex Ergo, vänster	124420	75-97	100	0,34
Stödkäpp Ergo, vänster, vit	124429	75-97	100	0,34
Stödkäpp Flex fast längd 98 cm	124460	98	100	0,34

Artikel (Artikelnummer)	Tillbehör	Reservdelar
Doppsko 19-20 mm (120750)		x
Doppsko 21-23 mm (120760)*		x
Isdubb Spets (123300)	x	
Isdubb Kronan (123350)	x	
Käpphållare Flex (124885)	x	
Gummifot Stabil (124889)	x	

*Endast till Stödkäpp Flex fast längd 98 cm (art. nr 124460)



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-28 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/stodkappar>

Tekniska data

- Material: rör i aluminium, handtag i polypropen, doppsko i naturgummi.
- Förväntad livslängd: 3 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning.
- Förvaring: förvara produkten i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus eller extrem värme/kyla. Rekommenderas att placeras stående eller liggande på en stabil yta för att förhindra att käppen deformeras.
- Återvinning och avfall: käppen återvinns som metallskrot.

Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av stödkäppen får göras.
- ⚠ Stödkäppens förväntade livslängd är tre år. Efter tre år bör inte käppen användas, då det finns risk för utmattning om käppen använts kontinuerligt under längre tid. Käppen utgångsdatum är angivet på produktetiketten placerad på stödkäppen.
- ⚠ Vid tecken på slitage eller skada på käppen får den inte användas. Kontrollera regelbundet att tappen på höjdjusteringen inte glappar. Uppmärksammas detta får käppen inte användas.
- ⚠ Käppen får aldrig användas för att stoppa en hissdörr eller liknande då detta riskerar att käppen skadas och kan gå av.
- Maximal brukarvikt enligt tabell ovan får ej överskridas.
 - Vid snö- och isigt underlag, rekommenderas att isdubb används tillsammans med käppen. Gå mycket försiktigt även med isdubb, då viss halkrisk kvarstår.
 - En blöt eller smutsig doppsko kan innebära halkrisk. Vid förflyttning från utomhus- till inomhusmiljö, tänk på att torka av doppskon vid behov.
 - Undvik om möjligt användning på lutande, ojämna eller hala underlag. Detta kan påverka käppens grepp mot underlaget.
 - Använd hiss istället för trappor när det är möjligt. Låt förskrivaren demonstrera gång och säker användning av käppen i trappa. Om en trappa måste användas, håll käppen vertikalt och inte vinklad mot underlaget. Använd även räcket som extra stöd.

Inställningsanvisning

- Käppen bör justeras av person med relevant kompetens för korrekt anpassning efter brukarens förutsättningar.
- Höjden justeras med tryckknappen, se figur 1. Käppen ska stå i upprätt position vid justering.
- Rådgör alltid med person med relevant kompetens vid frågor kring höjdjustering.
- Vid montering av isdubb Spets (art.nr 123300/123300K) eller Krona (art.nr 123350/123350K), se separat bruksanvisning som finns på Swerecos hemsida.

Användaranvisning

- Placera käppen cirka 5–10 cm utanför och något framför foten för god stabilitet.
- Gå med jämn rytm och undvik att luta dig för mycket framåt eller åt sidorna.
- Använd käppar enligt vårdgivarens instruktioner.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör käppen med mild tvällösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Produkter som rekonditioneras ska inkludera en fullständig kontroll enligt instruktionen nedan.


Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Doppskon inte är sliten eller skadad. En sliten eller skadad doppsko ska bytas ut.
- Tryckknappen för höjdjustering fjädrar tillbaka som den ska. Om tryckknappen inte fjädrar tillbaka ska käppen tas ur bruk.
- Inga sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage har uppstått på produkten. Hittas sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage ska käppen tas ur bruk.

Stödkäpp 124460 Flex fast längd kan kapas för att justera längden på stödkäppen. Det ska alltid utföras av behörig fackman:

1. Avlägsna doppskon.
2. Kapa röret med bågfil eller en rörkap, se figur 2. Snittet ska vara rakt.
3. Tryck tillbaka doppskon korrekt genom att trycka den hela vägen till botten.

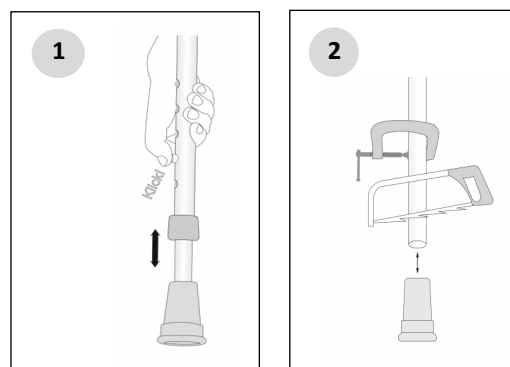

Produktens partinummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produktens utgångsdatum



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare



Produktens artikelnummer



Maximal brukarvikt



Varning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-28 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/stodkappor>