

Sjukvård • AN/IVA • Andningshjälpmedel

Art nr: OM-7025-8, OP-7025-8,
OK-7025-8, OT-7025-8

OxyMask™ PVC fri är en syrgasmask med hög patientsäkerhet och komfort. OxyMask ersätter flera olika syrgasbehandlingar vilket bidrar till färre produkter i lager samtidigt som det minskar det medicinska avfallet. OxyMask™ levererar syre med 1 till över 15 liter/minut, 24% till 90% FiO₂. Med OxyMask minskar risken för patienten att andas in CO₂ samt minskar risken för aspiration. Eftersom masken är öppen minskar det risken för klaustrofobi och det bildas varken värme eller fukt under masken. Det går att kommunicera under behandlingen, och det går även att dricka utan att behöva avbryta behandlingen.




Varumärke	OxyMask™			
Benämning	OxyMask™ PVC fri			
Art nr	OM-7025-8	OP-7025-8	OK-7025-8	OT-7025-8
Storlek	Vuxen	Plus (25% större)	Barn (3-10 år/ 15-32 kg)	Små barn (6 mån- 3 år/7-15 kg)
Slanglängd	2,1 m	2,1 m	2,1 m	2,1 m
Elastiskt band	enkelt	enkelt	enkelt	enkelt
Antal/kartong	25 st			
Material	TPE			
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.			

Användaranvisning OxyMask™ ska användas med minimal kontakt och är öppen för syretillförsel samt för bruk med USP, medicinsk grad av syre. När patienten inhalerar blandas syret med rumsluften, syrekoncentrationen bestäms individuellt. Vid exhalation släpper den öppna masken ut koldioxiden i utandningsluften.

- Avlägsna och kassera maskens transportskydd (1)
- Reell FiO₂ kommer att variera. Andningshastighet, andningsdjuphet och distansen av diffundering från ansiktet kommer att påverka behandlingen.
- Flödeshastighet bör ordinerars i kombination med användande av pulsoxiometer.
- Skall användas inom 5 år från tillverkningsdatum

(1)

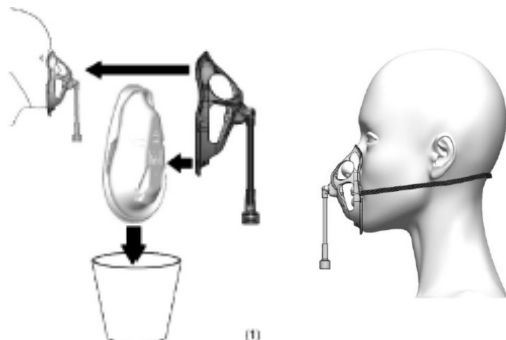

Oxygenflöde	O ₂ koncentration
1 LPM	24-27%
2 LPM	27-32%
3 LPM	30-60%
4 LPM	33-65%
5 LPM	36-69%
7 LPM	48-80%
10 LPM	53-85%
12 LPM	57-89%
≥15 LPM	60-90%



Sjukvård • AN/IVA • Andningshjälpmedel

Art nr: OM-7025-8, OP-7025-8,
OK-7025-8, OT-7025-8



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Fri från ftalater



En-patients-användande,
Kan användas av en patient
i upp till 29 dagar



Kan tvättas med alkalisk
tvållösning, pH 5-9.



Gör alltid en visuell kontroll
innan användning



Innehåller TPE



Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/
EG för medicintekniska
produkter.



Art nr OM-7025-8,
OP-7025-8, OK-7025-8,
OT-7025-8



Förekomst av oxygen i samband med självantändande material och tändningskälla kan orsaka eld och resultera i svåra personskador eller dödsfall. Rök inte då du använder denna produkt. Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas på grund av effekt på prestationsförmåga. Om du misstänker att användningen av denna medicintekniska produkt är förknippad med en negativ händelse, ska du rapportera information om händelsen till Swereco samt Läkemedelsverket.



Southmedic Inc
50 Alliance Blvd
Barrie, ON Canada L4M 5K3



Swereco AB, Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda

