

SWERECO Skötsel och rekonditionering

StaplaLätt

Fristående toalettstolsförhöjning med armstöd för vuxna
Hjälpmiddel i hemmet • Toalettbesök • Toaförhöjningar

Art nr: 144202, 144204

Skötsel- och rekonditioneringsanvisning

- Rengörs regelbundet vid behov med tvållösning pH 5-9, minst en gång per månad. Vi rekommenderar att man använder en trasa som doppats i varmt vatten med mildt rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att torka bort smuts och skräp.
- Vid byte av användare skall produkten desinficeras, antingen i maskin avsedd för ändamålet i max 85° i 3 minuter, maskinens torkningsfunktion ska användas för att torka produkten.
- Tillbehör skall rengöras separat.
- Låt produkten torka innan eventuell desinficering.
- Produkten kan desinficeras med isopropanol ≤70%.
- Vid rengöring och rekonditionering, kontrollera att plastdetaljer inte har några sprickor.
- Kontrollera stödfötterna. Utslitna eller skadade stödfötter skall bytas ut.
- Byt vid behov ut defekta delar.

Tillbehör:

Art nr 144206 ryggstöd
Art nr 144210 mjüksits
Art nr 144785 lockstödsband
Art nr 144750 stänkskydd
Art nr 144755 hink
Art nr 144760 hink med handtag

Reservdelar:

Art nr 120700 stödfot, grå
Art nr 120701 stödfot, vit
Art nr 14420206 toasits
Art nr 14420213 clips 25 mm
Art nr 14420225-S förlängarpåse



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda



SRN SE-MF-000033314

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240