

SOL-GUARD™ Säkerhetspruta och insulinspruta med fast kanyl

Produkt Specifikation

CE marked

SOL-GUARD™ Säkerhetspruta med fast kanyl





Artikelnummer	Volym	Gauge	Ytterdiameter (mm)	Längd (mm)	Längd (inch)
2102215SG	1 ml	22 G	0.7 mm	40 mm	1 1/2"
200034SG	1 ml	25 G	0.5 mm	16 mm	1"
200018SG	1 ml	25 G	0.5 mm	25 mm	5/8"
200019SG	1 ml	27 G	0.4 mm	12.5 mm	1/2"
200067SG	1 ml	28 G	0.3 mm	12.5 mm	1/2"
2152215SG	1.5 ml	22 G	0.7 mm	12.5 mm	1 1/2"

SOL-GUARD™ Insulinspruta

Artikelnummer	Volym	Gauge	Ytterdiameter (mm)	Längd (mm)	Längd (inch)
200003SG	0.3 ml	29 G	0.33 mm	12.5 mm	1/2"
2331516SG	0.3 ml	31 G	0.25 mm	8 mm	5/16"
233105SG	0.3 ml	31 G	0.25 mm	12.5 mm	1/2"
2531516SG	0.5 ml	31 G	0.25 mm	8 mm	5/16"
200017SG	1 ml	29 G	0.33 mm	12.5 mm	1/2"
200091SG	1 ml	31 G	0.25 mm	8 mm	5/16"

Avdelningsförpackning: 100 st Transportförpackning: 800 st

SOL-GUARD™ Säkerhetspruta och insulinspruta med fast kanyl

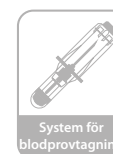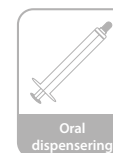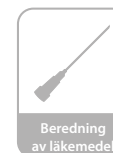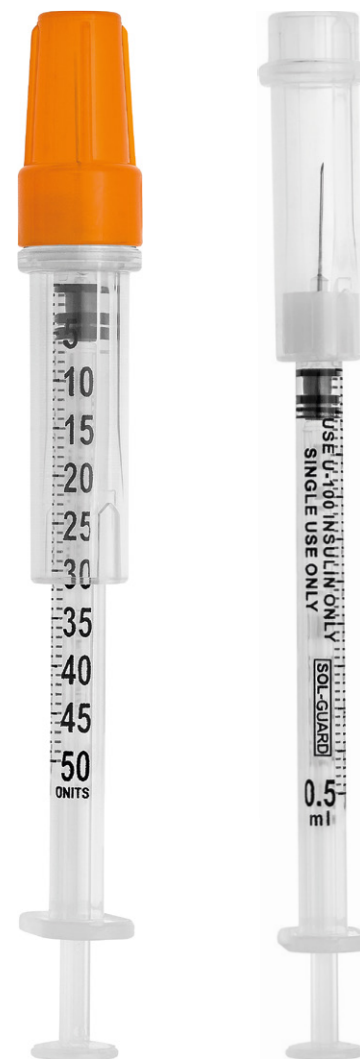


SWERECO

SOL-GUARD™ Säkerhetspruta och insulinspruta med fast kanyl

SOL-GUARD™ är en säkerhetskonstruerad spruta med fast kanyl för varierande typer av injektioner.

Den är konstruerad för att **reducera stickskador hos vårdpersonal vid hantering av läkemedel och vid injektion.**

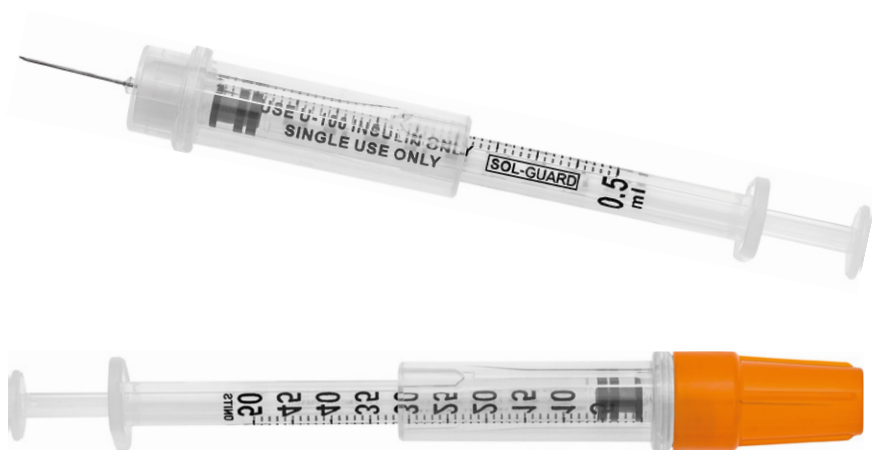

● **Transparent skydd, som man håller i ett enkelt och säkert grepp** - skydd under transport.

● **Transport Position** - Inget "av och på" med säkerhetsskyddet efter dosering.

● **Lågt "Dead Space"** - reducerar läkemedelsåtgången.

● **Klara och tydliga graderingar.**

Instruktioner för användning



Drag upp läkemedlet enligt gällande ordination.

För säkerhetsskyddet över hela kanylen tills det hörs ett klick. Detta försäkrar att säkerhetsskyddet sitter på plats för att transporteras färdigfylld till patienten.



För tillbaka säkerhetsskyddet tills det når ursprungspositionen och ge därefter injektionen enligt gällande riktlinjer.



Omedelbart efter injektion, för säkerhetsskyddet framåt tills ett klick hörs. För att låsa i detta säkra läge, vrid säkerhetsskyddet åt något håll tills det tar stopp och ett klick hörs.



Sprutan går nu inte att återanvända.

SWERECO