


Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort

Art nr: 1025, 1026, 1027, 1028

Qorpus Vita glidörngott har en sida som består av en specialvävd duchesse tyg vilket har en mycket låg friktion. Glidytan gör det enkelt för användaren att själv vända på huvudet. Man kan även lägga glidytan mot sängen och huvudkudden kan glida upp och ner i sängen, eller mot ett glidlakan så blir det fyrvägsglid. Glidörngottet kan användas av vårdpersonal som ett hjälpmedel för att förflytta och positionera brukare.

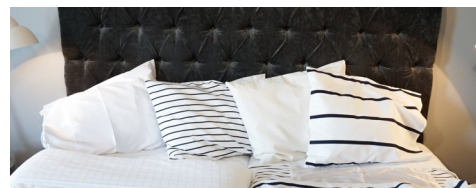

Varumärke	Qorpus Vita			
Benämning	Qorpus Vita glidörngott, B60xL50, smårandigt	Qorpus Vita glidörngott, B60xL50, bredrandigt	Qorpus Vita glidörngott, B60xL50, vitt	Qorpus Vita glidörngott, B60xL50, rutigt
Art nr	1025	1026	1027	1029
Färg	Smårandigt Vit/marinblå	Bredrandigt Vit/marinblå	Vitt	Rutigt Vit/marinblå
Info	Vanligt glidörngott med glidyta	Vanligt glidörngott med glidyta	Vanligt glidörngott med glidyta	Glidörngott som möjliggör fyrvägsglid.
Mått	B60 x L50 cm			
Antal produkter/ förpackning	1 st			
Material	100% Polyester 50% Bomull, 50% Polyester			
Glidyta Baksida				
Antal tvättar	Ca 200 st			
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.			

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 1025, 1026, 1027, 1029



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Produkten ska inte användas till att sitta på, då fallskada kan ske. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda