

Absorba

Lakansskydd Atlas

B 90 x L 85 cm

sanicare 
your daily life




Lakansskydd Atlas

är ett lakansskydd med handtag och utan bäddflikar. Lakansskyddet är för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Handtagen underlättar vid vändning av brukare.

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.



Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba lakansskydd Atlas
Sanicare art nr	1040
Totalyta BxL	90 x 85 cm
Absorberande yta BxL	90 x 85 cm
Sängbredd	90 cm
Absorptionskapacitet	2476 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material liggyta	100 % borstad Polyester
Material Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Material undersida	100 % Polyester
Tvättråd	 Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 450 st
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Bruksanvisning och råd vid användning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen.
- Vid användning av handtagen, ta ett stadigt grepp om handtagen.
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
*Certifikat nr står på produkten



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Art.nr.
1040



sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se