

**Lakansskydd Atlas** är ett lakansskydd med handtag och utan bäddflikar. Lakansskyddet är för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Handtagen underlättar vid vändning av brukare. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.



Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba lakansskydd Atlas
Art nr	<b>1040</b>
Totalyta	B90 x L85 cm
Absorberande yta	B90 x L85 cm
Sängbredd	90 cm
Absorptionskapacitet	2476 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material	
Ligg yta	100% Borstad Polyester
Handtag	Kraftig nylon
Absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Undersida	100% Polyester
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 450 st
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorterar efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

## Användaranvisning


- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen.
- Vid användning av handtagen, ta ett stadigt grepp om handtagen.
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.
- Observera att lakansskyddet inte är till för att lyfta brukare med!



\*Certifikat nr står på produkten



## Symboler:

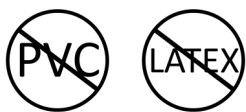

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 1040



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda