


Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Draglakan

Art nr: 1051


Qorpus Vita Gliddraglakan 4-vägs med handtag ger en mycket låg friktion och möjliggör enkel och säker förflyttning sida till sida samt upp och ner i säng. Det kan användas enskilt eller tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan för ytterligare minskad friktion. Handtagen som sitter i sidorna kan användas som öglor tillsammans med personlyft vid vändning sida till sida och även som handtag vid förflyttning i sidled. Gliddraglakanet ska bäddas in under madrassen efter genomförd förflyttning. Används tillsammans med lyften endast för vändhjälp, **FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR LYFT AV BRUKARE**. Mångårig erfarenhet inom vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för tryckskador. Gliddraglakanet är även ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal då det minskar belastning på rygg och axlar och möjliggör för en god ergonomi och arbetsmiljö. Glidyntans låga friktion gör vändningar och förflyttningar skonsamma och kraftbesparande för både patient och vårdgivare.

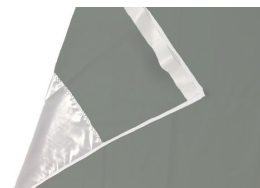


Benämning	Qorpus Vita Gliddraglakan 4-vägs med handtag
Varumärke	Qorpus Vita
Art nr	1051
Totalyta	B220x L140cm
Glidyta	B146x L140 cm
Till sängbredd	80-90 cm
Färg	Grå
Antal produkter/förpackning	1 st
Material	
Glidyta	100% Polyester
Bäddflikar	50% Bomull, 50% Polyester
Handtagsband	100% Polyester (PES)
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Användaranvisning

- Bäddas med glidytan nedåt mot ett befintligt glidlakan eller sängens vanliga lakan med bäddflikarna inbäddade under madrassen.
- Lossa på bäddflikarna före initiering av förflyttning.
- Efter genomförd förflyttning ska gliddraglakanet fixeras genom att bäddflikarna åter bäddas in under madrassen.

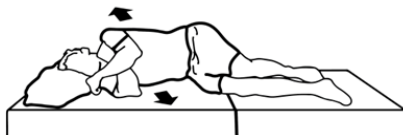

 Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Produkten får ej användas till att lyfta personer med i lyft. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Max: 220 kg

Max brukarvikt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 1051



*Certifikat nr står på produkten



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240