

Hjälpmiddel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Lakansskydd

Art.nr: 1169-S, 1169-M, 1169-L

**Lakansskydd Eldner** är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck. Bädda alltid in bäddflikarna under sängen för bästa komfort och säkerhet.




Varumärke	Absorba		
Benämning	Absorba Lakansskydd Eldner		
Art nr	<b>1169-S</b>	<b>1169-M</b>	<b>1169-L</b>
Totalyta	B 190 x L85 cm	B215 x L85 cm	B250 x L85 cm
Absorberande yta	B90 x L85 cm	B115 x L85 cm	B150 x L85 cm
Sängbredd	90 cm	120 cm	150 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)		
Antal produkter/förpackning	1 st		
Material	50 % Bomull, 50 % Polyester		
Ligg yta	95% Polyester, 5 % Rayon		
Absorptionsskikt	Polyuretan		
Spärrskikt	50 % Polyester, 50 % Bomull		
Bäddflikar	100 % Polyester		
Undersida			
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 450 st		
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		

### Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

### Symboler:

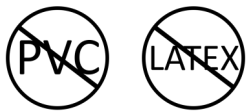

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. 1169-S, 1169-M, 1169-L



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



\*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

