

Lakansskydd Hestia är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.



Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba lakansskydd Hestia
Art nr	1211
Totalyta	B200 x L140 cm
Absorberande yta	B110 x L140 cm
Sängbredd	110 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	4252 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material	
Ligg yta	80% Bomull, 20% Polyester
Bäddflikar	80% Bomull, 20% Polyester
Absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Undersida	100% Polyester
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 400 st
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna under madrassen. Dra inte i bäddflikarna om lakansskyddet används.
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 1211



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
*Certifikat nr står på produkten



Medtech



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda