

Lakansskydd Frej är ett lakansskydd utan bäddflikar för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck. Bädda alltid in bäddflikarna under sängen för bästa komfort och säkerhet.




Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba lakansskydd Frej
Art nr	1221
Totalyta inkl liggyta	B 90 x L 150 cm
Sängbredd	90 cm
Absorptionskapacitet	3296 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material	
Ligg yta	100 % Polyester
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Undersidan	100 % Polyester
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorterar efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den blåa sidan mot madrassen.
- Dra inte i lakansskyddet när det används.
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

Symboler:

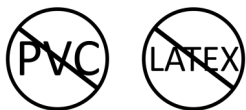

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. 1221



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

