

Absorba

Lakansskydd Herkules

sanicare 
your daily life




Lakansskydd Herkules

är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage.

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck. Bädda alltid in bäddflikarna under sängen för bästa komfort och säkerhet.




Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba lakansskydd Hercules
Sanicare art nr	1222
Totalyta	B190 x L80 cm
Absorberande yta	B90 x L80 cm
Sängbredd	140 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	1998 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material liggyta	80 % Bomull, 20 % Polyester
Material Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Material bäddflikar	50 % Polyester, 50 % Bomull
Tvättråd	 Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 450 st
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan

Bruksanvisning och råd vid användning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

 Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

 SWEDISH
Medtech



Art.nr.
1222



 OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

*Certifikat nr står på produkten



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.


sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se