

**Inkoglid Zeus** är ett lakansskydd med handtag som har en undersida av lågfriktionsmaterial samt bäddflikar för att fixera vid bäddningen. Inkoglidet används till stor del av vårdpersonal som assisterar/omvårdar brukare som har inkontinens och som även behöver positioneras eller förflyttas i sängen. Med hjälp av glidytan på baksidan samt handtagen kan Inkoglidet även användas som ett draglakan. Inkoglidet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Inkoglidet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten.



Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba inkoglid Zeus
Art nr	<b>12421</b>
Totalyta	B230 x L90 cm
Absorberande yta	B110 x L90 cm
Sängbredd	90 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	2476 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material	
Ligg yta	100% Borstad Polyester
Bäddflikar	80% Bomull, 20% Polyester
Absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Undersidan	100% Polyester
Handtag	Kraftig Nylon
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

## Användaranvisning

- Tvätta Inkoglidet före användning för att aktivera absorptionsförmågan
- Placera Inkoglidet i sängen med glidytan mot madrassen.
- Fixera skyddet med hjälp av bäddflikarna runt madrassen.
- Då Inkoglidet används som draglakan, ta ett stadigt grepp om handtagen vid förflyttning/positionering.
- Var noga med att Inkoglidet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att Inkoglidet inte är till för att lyfta brukare med!

## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 12421



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Bädda alltid i bäddflikarna. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



\*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

# SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240