

Absorba

inkoglid Zeus

sanicare 
your daily life



Inkoglid Zeus är ett lakansskydd med handtag som har en undersida av lågfriktionsmaterial samt bäddflikar för att fixera vid bäddningen. Inkoglidet används till stor del av vårdpersonal som assisterar/omvårdar brukare som har inkontinens och som även behöver positioneras eller förflyttas i sängen. Med hjälp av glidytan på baksidan samt handtagen kan lakansskyddet även användas som ett draglakan.



Inkoglidet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.

Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba inkoglid Zeus
Sanicare art nr	12421
Totalyta	B230 x L90 cm
Absorberande yta	B110 x L90 cm
Sängbredd	90 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	2476 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material liggyta	100 % Borstad Polyester
Material Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Material undersida	100 % Polyester
Material handtag	Kraftig Nylon
Tvättråd	<p>Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten</p>
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Bruksanvisning och råd vid användning

- Placera lakansskyddet i sängen med glidytan mot madrassen.
- Fixera skyddet med hjälp av vingarna runt madrassen.
- Då lakansskyddet används som draglakan, ta ett stadigt grepp om handtagen vid förflyttning/positionering.
- Var noga med att Kombiglidet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

 Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
*Certifikat nr står på produkten



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Bädda alltid in bäddflikarna. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkeemedelsverket.

   Art.nr. 12421



SWEDISH Medtech

sanicare
your daily life 

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se