

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Sittskydd


Art.nr: 1293AH, 1294AH, 1296AH,
1297AH, 1299AH

Sittskydd med antihalk finns i olika kulörer. Ett sittskydd är till för personer med inkontinens. Sittskyddet är diskret och funktionellt som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet är i mjuk velour samt med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Antihalkbeläggningen på undersidan förhindrar sittskyddet att kana iväg.



Varumärke	Absorba				
Benämning	Absorba anti-halksittskydd				
Art nr	1293AH	1294AH	1296AH	1297AH	1299AH
Färg	Blå	Svart	Blå	Grön	Svart
Vikt per produkt	175 g		150 g		
Totalyta	B60 x L 45 cm		B45 x L45 cm		
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	755 ml		660 ml		
Antal produkter/förpackning	1 st				
Material					
Sittyta	100 % Polyester				
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon				
Spärrskikt	Polyuretan				
Material baksida	100 % Polyester				
Antihalk	Skummix				
Antal tvättar	Ca 450 st				
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning				
Förvaring	Rumstemperatur				
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				

Symboler:

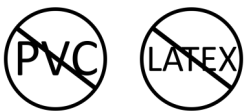

Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. 1293AH, 1294AH,
1296AH, 1297AH, 1299AH



Användaranvisning

- Tvätta sittskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera sittskyddet med den ljusa sidan mot underlaget.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Var uppmärksam så att sittskyddet ej faller till golvet – risk för fall. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

