

Träkäpp

Rörelsehjälpmedel • Stödkäppar

Art nr: 141119

Träkäpp är en hjälp för personer med nedsatt balans eller gångförmåga och bör ej användas till annat ändamål. Käppen är helt gjort i trä, som är ett stabilt och robust naturmaterial.

Träkäppen kapas efter önskad längd (doppsko ingår ej). Skall kopmpletteras med doppsko med artikelnummer 716sw.

Benämning	Träkäpp
Art nr	141119
Längd på käpp	98 cm
Tillbehör - Rekommenderad doppsko	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod
Material	Trä
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Max: 100 kg

Max brukarvikt



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 141119



Stödkäppen skall tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador eller är utsliten då detta kan medföra risk vid användning.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Swereco AB, Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda



Reg.-Nr.: MQ 0115318

Träkäpp

Rörelsehjälpmedel • Stödkäppar

Art nr: 141119

Användaranvisning

OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas i bruk

- För rätt användning av stödkäppen skall längden justeras till individuell längd
- Använd alltid stödet på motsatt sida av den skadade eller svaga sidan.
- Håll stödkäppen nära kroppen och luta den inte utåt,
- Placera stödkäppen så rakt mot marken som möjligt så att den inte glider iväg
- Sätt inte stödkäppen för långt bort från kroppen. Du riskerar då att ramla.
- När du sitter bör du använda stolar med armstöd så att när du ställer dig upp kan du använda armstödet som stöd.
- Om möjligt bör kvalificerad personal visa dig hur man går uppför trappor med stödkäpp.

- När du går i en trappa med en stödkäpp bör du hålla ledstången med den lediga handen.
- Håll stödkäppen i ett stadigt och omslutande grepp i handtaget.
- Välj en sko med låg och stadig klack så att benet klarar den extra vikten bättre.
- Användning av stödkäpp kan ge tryck i händerna eller belastning på armar och axlar, var därför noga med att vila ofta.
- Om du ramlar. Låt om möjligt stödkäppen falla från kroppen så att du inte faller på den!

Varning! Trappor utan ledstång utgör en ökad risk för fall och stor försiktighet bör iaktas när du går i en sådan trappa!

Säkerhetsföreskrift

- Produkten skall enbart användas till avsedd användning och föreskrifter enligt nedan skall följas!
- Utprovning/justering skall ske i samråd med personal som har kunskap om produkten och dess funktion. Felaktigt justerad stödkäpp begränsar användningsområdet samt kan leda till en ökad felbelastning och i värsta fall en säkerhetsrisk!
- Max brukarvikt får ej överskridas.
- Stödkäppen skall användas i original utförande för att garanti skall gälla samt original- Reservdelar/tillbehör.
- Handtaget får ej belastas med kassar el dyl.
- Stödkäppen får ej användas att lyfta med, trycka på knappar osv
- Gör en regelbunden kontroll av stödkäppen och om det finns yttre skador rådgör med en specialist. Sned eller skadad stöd-

- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko. Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom stödkäppen kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning! Löst liggande mattor eller dyl. kan glida iväg och orsaka olyckor!
- Undvik snö eller is om din stödkäpp inte är utrustad med doppskor för vinterbruk. Vid vinterväglag finns separat isbrodd art nr 1719 (en pigg) och 1718 (hel krona) som tillbehör.

Garanti — Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att käppen har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av käppen hos användaren.

Livslängd — Den beräknade livslängden på produkten är satt till två år vid normal användning. Brukaren ansvarar för ytterligare användning efter denna tidpunkt.

Rekonditionering/Återanvändning — Rekonditionering samt återanvändning av annan brukare rekommenderas ej! Allt sådant sker på antingen köparens eller rekonditionerarens risk och varken tillverkaren eller Swereco AB står för några garantier efter detta.