

MerryGrip aktiv griptång
Hjälpmiddel i hemmet • Greppa & Nå • Griptänger

Art nr: 144108, 144110,
144111, 144112

MerryGrip aktiv griptång är en griptång tillverkad i aluminium och plast vilket resulterar i en låg vikt. Griptången underlättar det dagliga livet för personer som har svårt att greppa eller nå olika föremål ex böja sig ner för att hämta något på golvet. Griptången passar i alla vardagliga moment, allt från trädgårdsarbete till en hjälpande hand i köket. Den finns i anpassade längder för olika ändamål och är utrustad med gripgummi i klon för ökad friktion.



En **aktiv modell** är för personer som klarar av att trycka ihop handtaget och hålla handtaget intryckt under hela momentet. Genom att trycka ihop handtaget pressas de båda klorna i griptångens ändrar ihop för att kunna greppa om föremålet. Gripgummit som sitter på de båda klorna gör att det är enkelt att fixera och flytta föremålet. När momentet är utfört släpper man handtaget och föremålet släpper från klorna. När man inte längre behöver använda griptången så kan man använda snöret som sitter i handtaget för att hänga den på en krok eller på rollatorn eller rullstolen för att ta den med sig. Det finns också under handtaget en kant som är utrustad med gummi som gör att du kan hänga ifrån dig griptången på en bordskant. På änden av handtaget är griptången utrustad med en magnet för att hjälpa till att få upp metallföremål så som nycklar och gem från golvet.

Varumärke	Swereco			
Benämning	MerryGrip aktiv griptång			
Art nr	144108	144110	144111	144112
Längd	40 cm	60 cm	70 cm	80 cm
Färgkod	Grå	Grön	Röd	Blå
Vikt per produkt	120 g	160 g	180 g	200 g
Material handtag	Polyamid (PA16)			
Material rör	Aluminium			
Tjocklek rör, Ø	5 mm			
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa			
Rengöring mellan brukare	Rengör med ljummet vatten eller citronsyra alt desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol (ej gripgummit) OBS! Griptången tål inte varmvatten/ånga över 65 °C			
Tillbehör/reservdel	MerryGrip Gripgummi art nr 144122			
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling			
Garanti	1 år			

MerryGrip aktiv griptång
Hjälpmedel i hemmet • Greppa & Nå • Griptänger

Art nr: 144108, 144110,
144111, 144112

Användaranvisning

- MerryGrip är avsedd och skall endast användas som hjälpmedel att förflytta, räcka eller att greppa lättare saker med - andra användningsområden rekommenderas ej.
- MerryGrip används med fördel till enklare och lättare trädgårdsarbete som t.ex. plocka ogräs, löv eller som planteringshjälp.
- Merrygrip underlättar i trånga utrymmen där det är svårt att komma till med andra grepp verktyg eller händer, både vad det gäller utrymme och djup.
- MerryGrip är en ovärderlig hjälp till att ta upp tidning, papper eller kuvert som har ramlat på golvet.
- MerryGrip fungerar som en förlängd arm i köksarbetet som tex att ta ned ingredienser eller andra föremål.

Säkerhetsföreskrifter

- Produkten skall användas för avsett ändamål
- Produkten skall inte användas för att bryta eller skruva med
- Produkten är inte till för att förflytta tunga föremål då det finns risk för skada på brukaren om föremålet släpper från klorna.
- Produkten skall inte förflytta heta eller farliga vätskor då det finns risk att brukaren skadas om det släpper från klorna.
- Produkten skall regelbundet kontrolleras och en defekt produkt skall kasseras.
- Regelbunden kontroll av gripgummi. Ett trasigt eller saknat gripgummi påverkar effekten av produkten och kan resultera i att föremålen glider ur griptångens klor.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Aluminium och polyamid



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 144108, 144110, 144111, 144112



Produkten skall inte förflytta heta eller farliga vätskor då det finns risk att användaren skadas om föremålet släpper från klorna. Var aktsam så att produkten ej lutar mot något eller ligger på golvet – risk för fallskada när användaren stäcker sig efter griptången. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda