

**MerryGrip aktiv griptång**  
Hjälpmiddel i hemmet • Greppa & Nå • Griptänger

Art nr: 144115, 144116, 144117

**MerryGrip passiv griptång** är en griptång tillverkad i aluminium och plast vilket resulterar i en låg vikt. Griptången underlättar det dagliga livet för personer som har svårt att greppa eller nå olika föremål ex böja sig ner för att hämta något på golvet. Griptången passar i alla vardagliga moment, allt från trädgårdsarbete till en hjälpande hand i köket. Den finns i anpassade längder för olika ändamål och är utrustad med gripgummi i klon för ökad friktion.



En **passiv modell** är för personer som har svårt att själv hålla handtaget intryckt under hela momentet. Genom att trycka ihop handtaget öppnas klorna i griptångens ände för att kunna greppa. När handtaget släpps greppar griptången automatiskt om föremålet. Gripgummit som sitter på de båda klorna gör att det är enkelt att fixera och flytta föremålet. När momentet är utfört trycker man ihop handtaget och föremålet släpper från klorna. När man inte längre behöver använda griptången så kan man använda snöret som sitter i handtaget för att hänga den på en krok eller på rollatorn eller rullstolen för att ta den med sig. Det finns också under handtaget en kant som är utrustad med gummi som gör att du kan hänga ifrån dig griptången på en bordskant. På änden av handtaget är griptången utrustad med en magnet för att hjälpa till att få upp metallföremål så som nycklar och gem från golvet.

Varumärke	Swereco		
Benämning	MerryGrip passiv griptång		
Art nr	144115	144116	144117
Längd	60 cm	70 cm	80 cm
Färgkod	Grön	Röd	Blå
Vikt per produkt	160 g	180 g	200 g
Material handtag	ABS plast		
Material rör	Aluminium		
Tjocklek rör, Ø	5 mm		
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa		
Rengöring mellan brukare	Rengör med ljummet vatten eller citronsyra alt desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol (ej gripgummit) OBS! Griptången tål inte varmvatten/ånga över 65 °C		
Tillbehör/reservdel	MerryGrip Gripgummi art nr 144122		
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling		
Garanti	1 år		

MerryGrip aktiv griptång  
Hjälpmiddel i hemmet • Greppa & Nå • Griptänger

Art nr: 144115, 144116, 144117

## Användaranvisning

- MerryGrip är avsedd och skall endast användas som hjälpmedel att förflytta, räcka eller att greppa lättare saker med - andra användningsområden rekommenderas ej.
- MerryGrip används med fördel till enklare och lättare trädgårdsarbete som t.ex. plocka ogräs, löv eller som planteringshjälp.
- Merrygrip underlättar i trånga utrymmen där det är svårt att komma till med andra grepp verktyg eller händer, både vad det gäller utrymme och djup.
- MerryGrip är en ovärderlig hjälp till att ta upp tidning, papper eller kuvert som har ramlat på golvet.
- MerryGrip fungerar som en förlängd arm i köksarbetet som tex att ta ned ingredienser eller andra föremål.

## Säkerhetsföreskrifter

- Produkten skall användas för avsett ändamål
- Produkten skall inte användas för att bryta eller skruva med
- Produkten är inte till för att förflytta tunga föremål då det finns risk för skada på brukaren om föremålet släpper från klorna.
- Produkten skall inte förflytta heta eller farliga vätskor då det finns risk att brukaren skadas om det släpper från klorna.
- Produkten skall regelbundet kontrolleras och en defekt produkt skall kasseras.
- Regelbunden kontroll av gripgummi. Ett trasigt eller att saknat gripgummi påverkar effekten av produkten och kan resultera i att föremålen glider ur griptångens klor.

## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Aluminium och polyamid



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 144115, 144116, 144117



Produkten skall inte förflytta heta eller farliga vätskor då det finns risk att användaren skadas om föremålet släpper från klorna. Var aktsam så att produkten ej lutar mot något eller ligger på golvet – risk för fallskada när användaren stäcker sig efter griptången. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda