

MerryGrip gripgummi
Hjälpmiddel i hemmet • Greppa & Nå • Griptänger

Art nr: 144122

MerryGrip gripgummi passar till MerryGrip griptång.

Gripgummit sitter på båda gripklorna för att lättare kunna greppa och hålla kvar om föremål. Vid byte av gripgummi, var noga att allt gammalt klister är borta samt att ytorna är rena från fett. Sätt dit det nya gripgummit och var noga att det sitter fast jämnt över hela ytan.



Varumärke	MerryGrip
Benämning	MerryGrip gripgummi
Art nr	144122
Antal gripgummi/ förpackning	1 st
Material	Gummi
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Tillbehör/reservdel till produkt	Passar till MerryGrip aktiv eller passiv griptång
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Gör alltid en visuell kontroll
innan användning



Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/
EG för medicintekniska
produkter.



Art nr 144122



Produkten skall inte förflytta heta eller farliga vätskor då det finns risk att användaren skadas om det släpper från klorna. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda