

MerrySock strumppådragare

Art. nr. 145163V



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda
www.swereco.com • order@swereco.com • +46 (0)8 5000 52 40

Hjälpmedel i hemmet • Greppa & Nå • Övrigt

Art nr 145163V

MerrySock strumppådragare är ett hjälpmedel för människor som har svårt att ta på sig sina strumpor själv. Passar för både vanliga korta och långa standardstrumpor och nylonstrumpor.

Strumppådragaren är tillverkad i polyetenplast. Den levereras med långa polyesterband och två klädnypor, som kan användas vid behov.

Strumppådragarens två klädnypor håller strumporna på plats och med hjälp av de långa banden drar man enkelt på sig strumpan. Produkten lämpar sig för personer som har nedsatt rörlighet eller problem med rygg, knä eller höftproblem. Tillverkad i böjbar plast.



Varumärke	MerryCare
Benämning	MerrySock strumppådragare
Sanicare art nr	145163V
Antal produkter/förpackning	1 st
Mått	B 22 x L 25
Storlek	Universal storlek
Färg	Transparent med röda band
Material	Polyetenplast
Material band	Polyester
Rengöring	Regelbunden rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa
Rengöring mellan brukare	Desinfektionsmedel med <40% isopropylalkohol
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.
Garanti	1 år



Produkten skall endast användas för avsett ändamål. Produkten skall regelbundet kontrolleras och en defekt produkt skall kasseras. Gör regelbundna kontroller av dragbanden. Ett söndrigt dragband kan medföra risk vid användning. Placeras ej i närheten av öppen eld eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 145163V

Användaranvisning

- Se till att den blanka sidan av strumppådragaren är mot strumpan.
- Böj ihop produkten och dra strumpan upp över flänsarna. (Vid behov fäst med klädnypor).
- Sitt ordentligt på en stol med ryggstöd eller på sängen med väggen bakom dig och stick in foten och dra försiktigt i banden mot dig.



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda
www.swereco.com • order@swereco.com • +46 (0)8-5000 5240