

Rörelsehjälpmedel • Tillbehör • Fotvaggga

Art nr: 145437

MerryFoot fotvaggga ger stöd och avlastning för underben och fot. Fotvagggan har en stomme av trä och är polstrad och klädd med vinröd galon.



Varumärke	MerryCare
Benämning	MerryFoot fotvaggga
Art nr	145437
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	2,2 kg
Mått	B30 x L55 x H36 cm
Mått på fotplattan	B30 x L23 cm
Mått på benplattan	B30 x L37 cm
Material	Stomme i björk, klädsel i galon
Rengöring	Rengörs med en fuktig trasa och torkas därefter ordentligt torr
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Användaranvisning

MerryFoot placeras framför en stol, en fåtölj eller liknande. Lägg upp det ben som skall avlastas på vaggan.

Monteringsanvisning

- Benplatta
 - Fyra skruvhål för benplattan
 - Fotplattan
 - Fyra skruvhål för fotplattan
- Montera benplattan (a) på medarnas längre del (b) med de medföljande skruvarna. Använd insexnyckel (e). Dra inte fast skruvarna helt.
 - Montera den mindre fotplattan (c) på medarnas kortare del (d) med de medföljande skruvarna. Använd insexnyckel (e). Dra åt skruvarna helt.
 - Därefter kan skruvarna på benplattan (b) dras åt helt.



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 145437



Observera! När fotvagggan ej används - ställ den på en plats så att den står säkert, utan risk för att någon snubblar över den. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

