


Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Glidlakan

Art nr: 2060100M, 2060140M,
2060200M, 2075100M, 2075140M,
2075200M, 2095100M, 2095140M,
2095200M

Qorpus Vita glidlakan är ett ergonomiskt hjälpmedel för personer med smärta eller nedsatt rörelseförmåga. Glidlakanet har ett blankt mittparti med mycket låg friktion. Denna glidyta gör det lättare för brukaren att ändra ställning i sängen – på egen hand eller hjälp av vårdare. När man använder glidlakan underlättas minsta lägesförändring och det medför att blodförsörjningen ökar till utsatta kroppsdelar. Mångårig erfarenhet från vården visar att användning av glidlakan minskar risken för tryckskador. Glidlakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal, då belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidytaens låga friktion gör att vändning av patienter kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten. Glidlakanet lämpar sig mycket väl inom t ex sjukhusvård, äldreomsorg, gruppboende och hemvård. Även gravida kvinnor och personer med rygg- eller höftproblem har stor nytta av ett glidlakan.

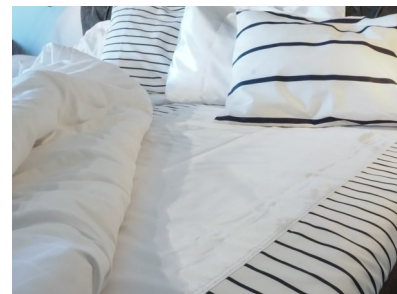


Benämning	Qorpus Vita glidlakan		
Varumärke	Qorpus Vita		
Art nr	2060100M	2060140M	2060200M
Totalyta	B200 x L100 cm	B200 x L140 cm	B200 x L200 cm
Glidyta	B60 x L100 cm	B60 x L140 cm	B60 x L200 cm
Till sängbredd	80-90 cm		
Art nr	2075100M	2075140M	2075200M
Totalyta	B220 x L100 cm	B220 x L140 cm	B220 x L200 cm
Glidyta	B75 x L100 cm	B75 x L140 cm	B75 x L200 cm
Till sängbredd	105 cm		
Art nr	2095100M	2095140M	2095200M
Totalyta	B240 x L100 cm	B240 x L140 cm	B240 x L200 cm
Glidyta	B95 x L100 cm	B95 x L140 cm	B95 x L200 cm
Till sängbredd	120 cm		
Färg	Smårandigt, Vit/marinblå		
Antal produkter/förpackning	1 st		
Material Glidyta Bäddflikar	Polyester 50 % Bomull, 50 % Polyester		
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st		
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Glidlakan

Art nr: 2060100M, 2060140M,
2060200M, 2075100M, 2075140M,
2075200M, 2095100M, 2095140M,
2095200M

Användaranvisning

- Glidlakanet bäddas in med hjälp av bäddflikar. Bäddflikarna håller glidet på plats.
- Glidytan bäddas uppåt. Det glider bra i sidled men bromsas upp av ett strävare material på sidorna
- Glidstoppet placeras så att patienten inte riskerar att glida ur sängen. Bädda så att glidstoppet är minst 10-12cm från sängens vardera ytterkant. Därmed förhindras att brukaren sätter sig på sängkanten och glider ner på golvet.

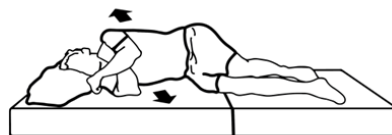

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Max: 220 kg

Max brukarvikt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 2060100M,
2060140M, 2060200M,
2075100M, 2075140M,
2075200M, 2095100M,
2095140M, 2095200M



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/ tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda