

Rörelsehjälpmedel • Kryckkäppar

Art nr: 220dasksw-L, 220dasksw-R,  
220dasueksw-L, 220dasueksw-R

**Armbågs krycka** är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material och reflex både bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång.

Materialet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex vinterjacka.

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.



Benämning	Armbågskrycka, anatomiskt, mjukt handtag, ofärgat rör			
Art nr	220dasksw-L	220dasksw-R	220dasueksw-L	220dasueksw-R
Handtag	Vänster	Höger	Vänster	Höger
Längd på krycka	76-96 cm		90-110 cm	
Färg rör	Alu		Alu	
Vikt per produkt	0,65 kg		0,68 kg	
Färg handtag	Svart			
Tillbehör –Rekommenderad doppsko	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod			
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.			

### Symboler:



Ingen PVC eller Latex




Max: 140 kg

Max brukarvikt



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.

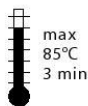

max  
85°C  
3 min

Tvättas i max 85 °C i max 3 minuter.



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Innehåller Polypropen, Aluminium och TPE



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. 220dasksw-L, 220dasksw-R, 220dasueksw-L, 220dasueksw-R



Kontrollera kryckan regelbundet. Kryckan skall kasseras och tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, är utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning. Trappor utan ledstång utgör en ökad risk för fall och stor försiktighet bör iaktas när du går i en sådan trappa! Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

### Justering av höjden på stödkäppen

Höjden av stödkäppen justeras med hjälp av tryckknappen. Tryck in knappen och drag i det undre röret till önskad längd. Efter justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rören avsedda hål och att tryckknappen är helt ute efter justering.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Swereco AB, Vagnvägen 4,  
364 42 Lenhovda



Reg.-Nr.: MQ 0115318

Rörelsehjälpmedel • Kryckkäppar

Art.nr: 220dasksw-L, 220dasksw-R,  
220dasueksw-L, 220dasueksw-R

## Användaranvisning

OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas i bruk

- För rätt användning av kryckan skall längden justeras till individuell längd. Justering av höjd Tryck in knappen som fixerar de båda rören, dra därefter isär eller skjut ihop rören till önskad längd. Lås sedan rören genom att matcha de två bulthålen och se till att tryckknappen snäpper på plats igen. OBS! Kontrollera alltid att rören är fixerade genom att försöka rotera eller flytta rören!
- För att ställa in önskad längd mellan armstödet och greppet och greppets vinkel, lossa de två skruvarna under greppet med den medföljande insektsnyckeln. Skjut handtaget till önskad längd mellan armstödet och greppet. Luta greppet till den vinkeln som är bekväm för dig. Dra åt skruvarna igen.
- Hur kryckan används är beroende på individuella behov och gångförmåga, utprovning/justering skall ske i samråd med kunnig personal som har kunskap om produkten och dess funktion i olika situationer för bästa möjliga resultat.
- Använd alltid stödet på motsatt sida av den skadade eller svaga sidan.
- Håll kryckan nära kroppen och luta den inte utåt, Placera kryckan så rakt mot marken som möjligt. så att den inte glider iväg.
- Sätt inte kryckan för långt bort från kroppen. Du riskerar då att ramla.

- När du sitter bör du använda stolar med armstöd så att du kan använda armstödet som stöd när du reser dig upp.
- Om möjligt bör kvalificerad personal visa dig hur man går uppför trappor med kryckor
- När du går i en trappa med en krycka bör du hålla ledstången med den lediga handen.
- När du går i en trappa med två kryckor, ta kryckorna i en hand och använd ledstången som stöd.
- Håll kryckan i ett stadigt och omslutande grepp i handtaget.
- Välj en sko med låg och stadig klack så att benet klarar den extra vikten bättre.
- Användning av kryckor kan ge tryck i händerna eller belastning på armar och axlar, var därför noga med att vila ofta.
- Tryckmärken eller skavsår kan uppstå på händer armar eller kläder och som förebyggande åtgärd rekommenderar vi att man använder polstring på handtag samt vaddering av armbygel.
- Om du ramlar. Låt om möjligt kryckorna falla från kroppen så att du inte faller på dem!
- Förvara aldrig kryckan i närheten av värme, i direkt solljus.
- Regelbunden rengöring av kryckan med ett mildt medel samt mjuk trasa.
- Handtag samt doppsko får inte rengöras med oljiga ämnen pga halkrisk!

## Säkerhetsföreskrift

- Produkten skall enbart användas till avsedd användning och föreskrifter enligt nedan skall följas!
- Utprovning/justering skall ske i samråd med personal som har kunskap om produkten och dess funktion. Felaktigt justerad krycka begränsar användningsområdet samt kan leda till en ökad felbelastning och i värsta fall en säkerhetsrisk!
- Max brukarvikt får ej överskridas.
- Kryckan skall användas i original utförande för att garanti skall gälla samt original- reservdelar/tillbehör.
- Handtaget får ej belastas med kassar el dyl.
- Kryckan får ej användas till att lyfta med, trycka på knappar osv.
- Gör en regelbunden kontroll av kryckorna och om det finns yttre skador rådgör med en specialist. Sneda eller skadade kryckor får ej användas då de har en sämre stabilitet. Kryckan skall under dessa omständigheter ej lagas utan bytas ut!

- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko. Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!
- Löst liggande mattor eller dyl. kan glida iväg och orsaka olyckor!
- Vid justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rören håll och att tryckknappen är helt ute efter justering.
- Alla skruvfästen måste dras åt ordentligt innan användning.
- Undvik snö eller is om din krycka inte är utrustad med doppskor för vinterbruk eller har en monterad isbrodd.
- Vid vinterväglag finns separat isbrodd art nr 1719 (en pigg) och 1718 (hel krona) som tillbehör.

**Garanti** — Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.

**Livslängd** — Den beräknade livslängden på produkten är satt till två år vid normal användning. Brukaren ansvarar för ytterligare användning efter denna tidpunkt.

**Rekonditionering/Återanvändning** — Rekonditionering samt återanvändning av annan brukare rekommenderas ej! Allt sådant sker på antingen köparens eller rekonditionerarens risk och varken tillverkaren eller Swereco AB står för några garantier efter detta.