

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Draglakan

Art nr: 3090100M, 3090140M,  
3105140M, 3120140M

**Qorpus Vita draglakan** är ett utmärkt hjälpmedel för vårdpersonalen för att positionera och förflytta patienter i sidled /från sida till sida samt vid behov, upp och ner i sängen. Vid förflyttning, låt lakanet hänga ner på sidorna och ta tag i lakanet på vardera sidan för ett stadigt tag och en säker förflyttning. När positioneringen är avslutad ska lakanet bäddas in under madrassen.

Draglakanet kan användas tillsammans med ett glidlakan för att det ska bli lättare att positionera tunga brukare.



<b>Benämning</b>	Qorpus Vita draglakan, bredrandigt			
<b>Varumärke</b>	Qorpus Vita			
<b>Art nr</b>	<b>3090100M</b>	<b>3090140M</b>	<b>3105140M</b>	<b>3120140M</b>
<b>Totalyta</b>	B220 x L100 cm	B220 x L140 cm	B240 x L140 cm	B250 x L140 cm
<b>Till sängbredd</b>	90 cm		105 cm	120 cm
<b>Färg</b>	Bredrandigt, Vit/marinblå			
<b>Antal produkter/ förpackning</b>	1 st			
<b>Material</b>	65% Bomull, 35% Polyester			
<b>Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)</b>	Ca 200 st			
<b>Kasseras</b>	Textilåtervinning alt brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning			
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur			
<b>Övrig information</b>	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.			

## Symboler:



Ingen PVC eller  
Latex



Tvättråd



Max: 220 kg

Max brukarvikt




Produkten följer  
(EU) MDR  
2017/745 och  
2007/47/EG för  
medicintekniska  
produkter.

REF

Art nr  
3090100M,  
3090140M,  
3105140M,  
3120140M

## Användaranvisning

- Placera draglakanet i sängen. Används draglakanet tillsammans med ett glidlakan placeras draglakanet ovanpå glidlakanet.
- Med ett stadigt tag i draglakanet förflyttar man brukaren i sidled.
- När positioneringen är klar skall alltid draglakanet bäddas fast runt madrassen med hjälp av vingarna.
- Brukaren ska ligga direkt på draglakanet.
- Produkterna är märkta med anvisning för hur draglakanet skall bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.

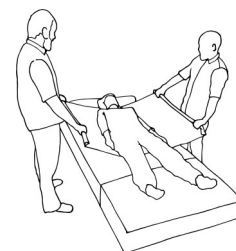

Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Används draglakan tillsammans med glidlakan skall man observera att det finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**

\*Certifikat nr står på produkten



Medtech



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda