

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel

Art nr: 3530


Sanisoft mini passar till personer med droppinkontinens. Sanisoft mini är ett engångsskydd som är en liten och tunn binda med vingar.

Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt. Sanisoft mini är särskilt utformad för att hålla dig torr och fräsch. Med vingar för bättre skydd mot läckage.

Limsträng på undersidan för bättre fixering. Produkten är klinisk prövad.



Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini
Art nr	3530
Antal produkter/förpackning	28 st
Antal produkter/transportförpackning	224 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	99 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	33 ml
Material	
Absorptionsmaterial	Airlaid av cellulosa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropylen
Spärrskikt	Polyeten
Mått	B 7-14 x L 22,5 cm
Färg på releasremsan	Vit
Kasseras	Brännbart, släng <u>ej</u> i toaletten.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

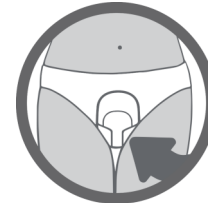

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Engångsprodukt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 3530

Användaranvisning

- Produkten fästs i trosa/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB,
Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda