

Sanisoft Normal  
Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel


Art nr: 3531

Sanisoft normal passar till personer med droppinkontinens. Sanisoft normal är ett engångsskydd som är särskilt utformat för att hålla dig torr och fräsch samt extra mjuk för användare med känslig hud. Uppsugningen är extra snabb och skyddet innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt. Har ett spärrskikt som förhindrar genomvätning. Limsträng på undersidan för fixering. Färgkodad releaseremsa.

Produkten är klinisk prövad.



Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft normal
Art nr	3531
Antal produkter/förpackning	20 st
Antal produkter/transportförpackning	240 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	214 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	71,3 ml
Material	
Absorptionsmaterial	Fluffmassa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropylen
Spärrskikt	Polyeten
Mått	B 6 x L 22,5 cm
Färg på releaseremsa	Vit med ljusgrå text
Kasseras	Brännbart, släng <u>e</u> i toaletten.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

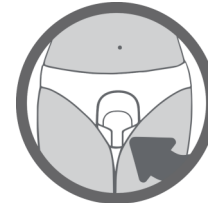

## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Engångsprodukt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 3531

## Användaranvisning

- Produkten fästs i trosa/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB,  
Vagnvägen 4,  
364 42 Lenhovda