


Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel

Art nr: 3536

Sanisoft mini kol är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd och har vingar samt är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt kolfilter. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar



Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini kol
Art nr	3536
Antal produkter/förpackning	25 st
Antal produkter/transportförpackning	250 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	47,6 ml
Material	
Absorptionsmaterial	Airlaid av cellulosa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropylen
Spärrskikt	Polyeten
Kolfilter	Aktivt kol och viskos
Mått	B 7,5-15 x L 30 cm
Färg på releasremsan	Vit med mörklila text
Kasseras	Brännbart, släng <u>ej</u> i toaletten.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

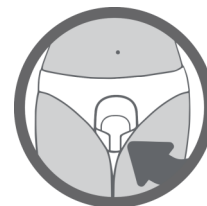

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Engångsprodukt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr. 3536

Användaranvisning

- Produkten fästs i en underbyxa eller en i fixeringsbyxa med hjälp av en klisterremsa. Avlägsna försiktigt skyddsremsan och applicera skyddet enligt illustrationen.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion. Placeras ej i direkt solljus inte heller i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB,
Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda