

Rörelsehjälpmedel • Förflyttningshjälpmedel • Glidbrädor

Art nr: 4700012

Glidbräda **bananen** underlättar förflyttningar mellan t.ex. säng och rullstol. Glidbrädan ligger väl fixerad med hjälp av stora antihalk plattor placerade på brädans undersida.

### Användaranvisning:

- Placera den ena änden under brukaren och den andra i t ex sängen.
- Avstånd mellan förflyttningspunkterna på 20 cm tillåter en brukarvikt på max 150 kg.



Varumärke	Samarit
Benämning	Samarit glidbräda, bananen
Art nr	4700012
Antal / förpackning	1 st
Mått	B23 x L68 cm
Vikt per produkt	750 g
Material	Polyeten med hög densitet
Färg	Gul
Tillbehör	Extra antihalk klisterlappar, art nr 4700090
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa, eller desinfektionsmedel med >40% ISO propylalkohol
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. Garanti 2 år.

### Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 4700012



Max: 150 kg

Max brukarvikt



Vid användning måste non-slip beläggningen på baksidan ses över så att de är oskadda och har ett bra grepp på kontaktytan. Förflytta dig inte mellan två punkter som överstiger 30% av storleken på glidbrädan. Skall ej komma i kontakt med varma/heta källor, får ej hettas upp!

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket. Tillverkaren finner ni på produktbladet.



Samarit Medizintechnik Dorfplatz  
2, CH-8126 Zumikon  
Tel: +41 44 918 10 11



Swereco AB, Vagnvägen 4,  
364 42 Lenhovda

