

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Draglakan

Art nr: 5090140M

**Qorpus Vita 4-vägs gliddraglakan** är ett bra hjälpmedel för vårdpersonal för att förflytta och positionera brukare. Tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggörs förflyttningen både i sidled och upp och ned i säng. Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för tryckskador.

Glidlakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal. Belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidyntans låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten.

OBS! Produkten får ej användas till att lyfta brukaren med.



<b>Benämning</b>	Qorpus Vita 4-vägs gliddraglakan, rutigt
<b>Varumärke</b>	Qorpus Vita
<b>Art nr</b>	<b>5090140M</b>
<b>Totalyta</b>	B220 x L140 cm
<b>Glidyta</b>	B146 x L140 cm
<b>Till sängbredd</b>	90-120 cm
<b>Färg</b>	Rutigt, Vit/marinblå
<b>Antal produkter/förpackning</b>	1 st
<b>Material</b>	
<b>Liggyta/Bäddflikar</b>	Polyester/Bomull
<b>Glidyta</b>	Polyester
<b>Antal tvättar</b> (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
<b>Kasseras</b>	Textilåtervinning alt brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övrig information</b>	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Produkten får inte användas till att lyfta brukare med eller tillsammans med en lift. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



\*Certifikat nr står på produkten



## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvätråd



Max: 220 kg

Max brukarvikt




Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 5090140M

## Användaranvisning

- Bädda ett Qorpus Vita Glidlakan i sängen med glidyntan vänd uppåt. Glidlakanet fixeras i sängen med hjälp av vingarna och bäddas in med ca 10-12cm.
- Placera gliddraglakanet ovanpå det nerbäddade glidlakanet med glidyntan vänd neråt så att glidyntorna möts.
- Med ett stadigt tag i draglakanet förflyttar man brukaren i sidled eller upp-ned i säng.
- När positioneringen är klar skall alltid draglakanet bäddas fast runt madrassen. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas!
- Brukaren ska ligga direkt på draglakanet – inget ytterligare lakan behövs.
- Produkterna är märkta med vilken sida produkten skall bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.

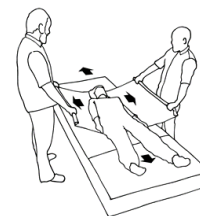

SRN SE-MF-000033314



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

# SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240