


Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Draglakan

Art nr: 6090140G

Qorpus Vita 2-vägs gliddraglakan är ett bra hjälpmedel för vårdpersonal för att förflytta och positionera brukare. Gliddraglakan möjliggör förflyttning i sidled för att underlätta positionering. Gliddraglakanet har glidyta på undersidan och kan användas när man inte önskar att kombinera både ett glidlakan och ett draglakan.

Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för tryckskador. Gliddraglakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal. Belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidytns låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten.

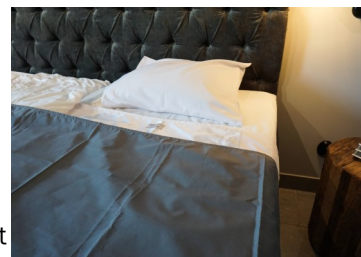

Benämning	Qorpus Vita 2-vägs gliddraglakan, grått
Varumärke	Qorpus Vita
Art nr	6090140G
Totalyta	B220 x L140 cm
Glidyta	B146 x L140 cm
Till sängbredd	90-120 cm
Färg	Grått
Antal produkter/förpackning	1 st
Material	
Liggyta/Bäddflikar	Polyester/Bomull
Glidyta	Polyester
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas!

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. OBS! Produkten får ej användas till att lyfta brukaren med.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Max: 220 kg

Max brukarvikt




Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produk-



Art nr 6090140G

Användaranvisning

- Placera gliddraglakanet direkt på sängen.
- Med ett stadigt tag i gliddraglakanet förflyttar man brukaren sidled i säng.
- När positioneringen är klar skall alltid gliddraglakanet bäddas fast runt madrassen. **Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas!**
- Brukaren ska ligga direkt på gliddraglakanet – inget ytterligare lakan behövs.
- Produkterna är märkta med vilken sida produkten skall bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.
- Vill man ha en extra glideffekt kan ett Qorpus Vita glidlakan bäddas i sängen med glidyta vänd uppåt, därefter kan ett gliddraglakan bäddas ovanpå så att glidyterna möts.

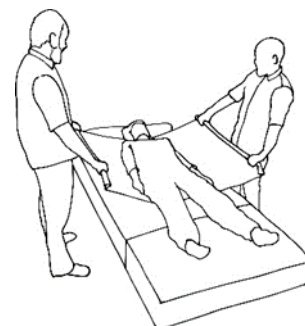

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240