

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel • Nattdräkter Unisex

Art nr: 6199, 6200, 6201, 6202,
6203, 6204, 6205

Sanicare Nattdräkt med öppning på höger axel och långa ben passar till personer som har en demenssjukdom. Nattdräkten underlättar även för vården av patienter med demenssjukdom. Genom att inkontinenshjälpmedlet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn.

Den heltäckande nattdräkten är öppningsbar i på ena axeln och försvårar för patienten att själv komma åt och ta av sig inkontinensskyddet.

Nattdräkten har långa ben och passar både män och kvinnor.




Varumärke	Sanicare						
Benämning	Sanicare nattdräkt, långa ben, knäppning höger axel						
Art nr	6199	6200	6201	6202	6203	6204	6205
Storlek	XXS/130	XS/150	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	70 cm	78 cm	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm	118 cm
Mått benöppning	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm
Mått byst	74 cm	80 cm	88 cm	94 cm	104 cm	112 cm	120 cm
Vikt/produkt	230 g	260 g	300 g	300 g	400 g	499 g	499 g
Färg	Vit						
Antal produkter/ förpackning	1 st						
Material	93 % bomull, 7 % elastan						
Krympning	<5%						
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)						
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning						
Förvaring	Rumstemperatur						
Övrig information	<p>Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel.</p> <p>Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.</p>						



Dra inte i tyget vid på/av klädnad

Symboler:

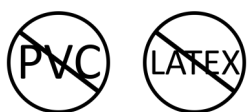

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Användaranvisning

- Prova noggrant ut rätt storlek. Är måtten mellan två storlekar - ta den större.
- Öppna nattdräktens tryckknappar och klä på nattdräkten genom uringningen.
- OBS! Dra inte i tyget vid på/av klädnad - tyget tål inte kraftig dragkraft.



Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion. Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Se till att knappar ej är lösa/lossnat - risk för kvävning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Dra inte i nattdräktens tyg vid påklädning, kan orsaka slitage/skador på tyget samt sömmar. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läke-medelsverket.



SRN SE-MF-000033314



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB,
Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240