

# Sanifix absorberande boxertrosa för barn

**sanicare**   
*your daily life*



**Sanifix absorberande boxertrosa** är en tvättbar absorberande flergångsbyxa för barn . Byxan är av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvättning. Byxan passar bra till barn som har droppinkontinens och har svårt att behålla engångsskydd på. Produkten kan på så sätt göra det möjligt att fortfarande klara toalettbesöken själva utan att riskera läckage. Produkten passar även bra för de som är känsliga för klister.



Klarar ca 100 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa				
Sanicare art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek/ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11+ år
Mått höft/stuss	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
Mått midja	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
Mått benöppning	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
Vikt/produkt	39 g	47 g	50 g	52 g	62 g
Teoretisk abs.kap. ISO 11948-1 ml	200 ml				
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Färg	Vit				
Antal/förpackning	1 st				
Material	Byxan Absorptionsskikt Spärrskikt				
Krympning	95 % Bomull, 5 % Spandex 70 % Viskos, 30 % Polyester Polyuretan				
Tvättråd	<5 %				
Antal tvättar					
Kasseras	Ca 100 st (normal hushållstvätt)				
Förvaring	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.				
Övriga information	Rumstemperatur				
	Produkten innehåller inte PVC, Latex.				
	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				

#### Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet.
- Storleken mäts runt midjan.
- Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.
- Vid tvätt tvättas hela produkten inklusive ilägg.
- Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptions-förmågan.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läke-medelsverket.

Sanicare AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg



Art.nr.  
6401-6405



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
\*Certifikat nr står på produkten



sanicare  
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se