

Rörelsehjälpmedel • Tillbehör

Art nr: 716sw, 716bl, 716gr, 716ge

Doppsko med stålینlägg är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålینlägg för att minska risken att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka eller stödkäpp.



Benämning	Doppsko, 16 mm			
Art nr	716sw	716bl	716gr	716ge
Färg	Svart	Blå	Grå	Gul
Storlek innerdiameter	16 mm			
Material	Rågummi			
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa.			
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.			

Monteringsanvisning

Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixeras säkert och inte ramla av vid användning. Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.

Säkerhetsföreskrift

Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko. Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget. Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka. Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning! OBS! Artikel 716 Passar endast till kryckor/käppar som är 17mm i diameter Ø.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Max: 150 kg

Max brukarvikt



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 716sw, 716bl, 716gr, 716ge

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läke-medelsverket



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine



Swereco AB, Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda



Reg.-Nr.: MQ 0115318