



Hjälpmedel i hemmet • Toalettbesök • Tillbehör

Art nr: 720624

**Merryarm toalettarmstöd** monteras vid toaletten och används av personer som inte kan resa eller sätta sig på toaletten. Armstödet är ett uppresningsstöd vid toalettbesök. Stödet är tillverkat av reptåligt, vit epoxilackerad, plattovalt stålrör. MerryArm kan fällas upp mot väggen och monteras med hjälp av en väggplatta art.nr 720622 som är 20x10 cm. Stödet fälls upp mot väggen med ett enkelt handgrepp. När stödet skall fällas ner, fatta tag i stödet och dra det nedåt! Tillbehör och reservdelar till Merryarm toalettarmstöd finner ni i tabellen nedan.

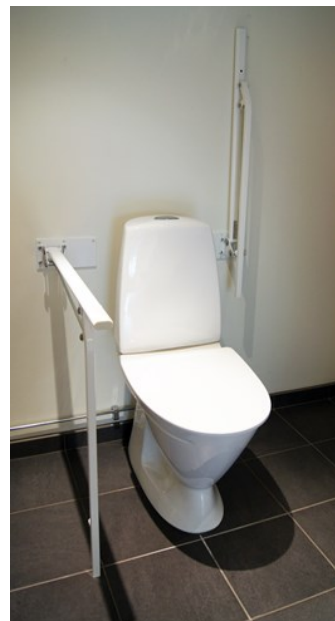


<b>Varumärke</b>	MerryCare		
<b>Benämning</b>	MerryArm toalettarmstöd, 78 cm		
<b>Art nr</b>	720624		
<b>Mått</b>	L78 x H80 cm		
<b>Antal produkter/ förpackning</b>	1 st		
<b>Material</b>	Epoxilackerad metall		
<b>Tillbehör som ingår till MerryArm toalettarmstöd</b>	Väggplatta 20x10 cm med art.nr 720622		
<b>Tillbehör och reservdelar att köpa till</b>	<b>Tillbehör:</b> <u>Väggplatta</u> Väggplatta 10x10 cm art.nr 720623 Väggplatta 36x16 cm art.nr 720621	<b>Tillbehör:</b> <u>Toalettappershållare</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rostfri tandad art.nr 720625TA</li> <li>Kromad rak art.nr 720620A</li> </ul> Fäste till p-hållare (ingår vid köp av toapappershållare) art.nr 720626	<b>Reservdelar:</b> Plastdel till golvben art.nr 720624/1 Plastdel till armstöd art.nr 720624/2
<b>Kasseras</b>	Sorteras efter lokal anvisning		
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur		
<b>Övrig information</b>	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		

 Observera att det finns svängrum för att fälla ned armstödet – risk för skada annars. Testa alltid att den är stadigt förankrad i väggen. Kontrollera alltid att armstödet är nedfällt när det ska användas!

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

 SRN SE-MF-000033314

 Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda



## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Kan tvättas med alkalisk tvål-lösning, pH 5-9.



Max: 100 kg

Max brukarvikt



Innehåller kromad eller rostfritt stål



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 720624