

Haklapp  
Hjälpmedel i hemmet • Kök & Måltid • Bestick & Servering

Art.nr: 7239, 7240, 7242

**Absorba haklapp** är ett hjälpmedel vid matstunden. Haklappen är tillverkad i ett slitstarkt material och med en laminering vilket gör att produkten är 100% vätsketätt och gör den bekväm och följsam vid matstunden. Efter användning är det enkelt att torka av eller alternativt skölja haklappen under kranen. Knäppbar spillficka och reglerbar halsvidd. Ett alternativ till engångs haklapp för de som vill ha en skön och bekväm haklapp i snyggt mönster.

Miljö: Förbrukad produkt kan kastas i soporna. Den plast som ingår (polyuretan) bildar endast vattenånga vid förbränning. Produkten har nickelfria tryckknappar.



Varumärke	Absorba		
Benämning	Absorba haklapp		
Art nr	7239	7240	7242
Färg	Rödblommig	Blå paisley	Blå
Antal produkter/ förpackning	1 st		
Mått	B45 x L85 cm		
Material	100 % Polyester		
Regelbunden rengöring	Torka av med en trasa eller skölj under kranen. Kan tvättas ca 100 gånger i 60 grader.		
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		



För spillficka – vik och tryck ihop tryckknapparna



Enkel knäppning i nacken.

## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 7239, 7240, 7242



Läkemedelsverket.

Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda



\*Certifikat nr står på

