


Saniline C Super with wings  
Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel • Engångsprodukter

Art nr: 7473

Saniline Super with wings är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.



Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Antal produkter/förpackning	12 st
Antal produkter/transportförpackning	144 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	113 ml
Material	
Absorptionsmaterial	Termobunden massa, superabsorbenter
Kolfilter	Aktivt medicinskt kol, polyester / polyolefin
Ytskikt	Non-woven av polypropylen
Spärrskikt	Polyeten
Mått	B14,5 x L25,8 cm
Kasseras	Brännbart, släng <u>e</u> j i toaletten.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

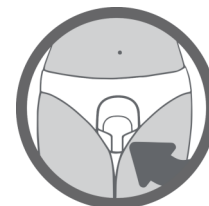

## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Engångsprodukt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 7473

## Användaranvisning

- Produkten fästs i en underbyxa eller en i fixeringsbyxa med hjälp av en klisterremsa. Avlägsna försiktigt skyddsremsan och applicera skyddet enligt illustrationen.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion. Placeras ej i direkt solljus inte heller i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB,  
Vagnvägen 4,  
364 42 Lenhovda