

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Draglakan

Art nr: 8090100K

Qorpus Vita kombinationset är ett Qorpus Vita draglakan och ett Qorpus Vita glidlakan i kombination som möjliggör förflyttning sidled i säng, för att underlätta positionering av brukare för vårdpersonal. Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet. Qorpus Vita kombinationset är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal då belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidyntans låga friktion tillsammans med draglakanet möjliggör att vändning av patient kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten.



Benämning	Qorpus Vita kombinationset	
Varumärke	Qorpus Vita	
Art nr	8090100K	
Produkt innehåller	3090100G (Draglakan)	2060100 (Glidlakan)
Totalyta	B220 x L100 cm	B220 x L100 cm
Glidyta	-	B60 x L100 cm
Färg	Grått	Vitt
Material	65 % Bomull, 35 % Polyester	50 % Bomull, 50 % Polyester
Till sängbredd	90 cm	
Antal produkter/förpackning	1 st	
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st	
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Max: 220 kg

Max brukarvikt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter




Art nr 8090100K

Användaranvisning

- Bädda Qorpus Vita glidlakan i sängen med glidyten vänd uppåt. Qorpus Vita glidlakan fixeras i sängen med hjälp av vingarna och bäddas in med ca 10-12cm *glidstopp på vardera sidan om sängkanten.
- Glidlakanet är märkt med vilken sida produkten skall bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.
- Placera draglakanet ovanpå det nerbäddade glidlakanet (för att underlätta förflyttning i sidled).
- Med ett stadigt tag i draglakanet förflyttar man brukaren i sidled.
- När positioneringen är klar skall alltid draglakanet bäddas fast runt madrassen med hjälp av vingarna.
- Brukaren ska ligga direkt på draglakanet – inget ytterligare lakan behövs.
- Produkterna är märkta med anvisning för hur draglakanet skall bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.

OBS! Glidlakanet bäddas in med ca 10-12 cm mellan glidyta och madrassens kant, detta markeras med långsgående söm. Detta är ett så kallat glidstopp för att användaren inte skall riskera att glida ur sängen och det förhindrar även att brukaren sätter sig på sängkanten och glider ner på golvet.

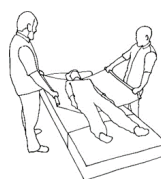

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240