

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel

Art nr: 9100, 9101, 9102, 9103,
9104, 9105


Sanifix benfixering är avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse passar både höger och vänster ben och kan fixeras på låret eller vaden. För fixering vid underbenet lämpar sig dom mindre storlekarna bäst.

Produkten är färgkodad.



Varumärke	Sanifix					
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse					
Art nr	9100	9101	9102	9103	9104	9105
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Vit
Mått benöppning	20-30 cm	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm	75-105 cm
Vikt/produkt	12 g	15,5 g	22 g	26 g	30 g	33g
Antal/förpackning	3 st					
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex					
Antal tvättar	Ca 25 st (normal hushållstvätt)					
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.					
Förvaring	Rumstemperatur					
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.					

Symboler:

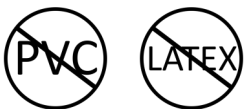

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105

Användaranvisning

Storleken mäts runt låret alternativt vaden. Rätt storlek är viktig för att få önskad effekt och att urinpåsen skall sitta på plats även då påsen är full. Placera urinpåsen i den sydda fickan med avrinningsröret genom öppningen i fickans underkant.

OBS! Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

