

Lakansskydd Kameleont är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Det blåa ytskiktet indikerar med en färgförändring att lakansskyddet blivit blött. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.



Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba lakanskydd Kameleont
Art nr	BI7136
Totalyta	B190 x L85 cm
Absorberande yta	B90 x L85 cm
Sängbredd	90 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	2099 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material	
Ligg yta	50% Polyester, 50% Bomull
Absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Bäddflikar	65% Polyester, 35% Bomull
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr BI7136



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Bädda alltid in bäddflikarna. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda